

Handhavande/Rengöring

- **Efter varje nebulisering** - plocka isär apparaten (även batterikabeln).
 - Skölj neb.kammarens delar noga – låt lufttorka
- **Varje kväll** - lägg neb.kammarens delar i kranvarmt vatten + ett par droppar diskmedel (minskar ytspänningen)
 - Skölj neb.kammarens delar noga – låt lufttorka
- **1 gång /vecka** – koka neb.kammaren med ett par droppar diskmedel, i ca 10-15 min.
 - Skölj neb.kammarens delar noga – låt lufttorka
- **1 gång/månad**- lägg neb.kammaren i en ättikslösning (1 del 12% ättikssprit + 5 delar vatten) låt ligga i 30-60 min.
 - Skölj neb.kammarens delar noga – låt lufttorka

