

Kort bruksanvisning: Hygien och underhåll av
PARI LC SPRINT® nebulisatorer – för hemmabruk



1

Rengöring
efter varje användning

- Plocka isär nebulisatorn.
- Rengör med varmt vatten och lite diskmedel.
- Spola alla delar noggrant under rinnande vatten.



2

Desinfektion
en gång om dagen

- Kokas i en tillräcklig mängd vatten (5 minuter).
- eller
- I vaporisator (ångdesinfektor, egentligen för nappflaskor),



3

Torkning

- efter varje rengöring och/eller desinficering
- Lägg delarna på en torr, luddfri duk.



4

Förvaring

Förvara delarna på en torr och dammfri plats.



5

Underhåll: minst en gång per år

Byt lufftfilter, nebulisator och anslutningsslang (PARI årsförpackning).
Byt tidigare om rengöring ej kan ske eller vid skada.

Följ alltid nebulisatorns och kompressorns bruksanvisningar. Där finns en detaljerad beskrivning.
Desa medföljer apparaterna. Saknas bruksanvisningen kan den beställas på **020 78 80 35**.

MEDI PLAST®

Mediplast AB

Kantyxegatan 29, 213 76 MALMÖ

Tel: 020 78 80 35

Fax: 040 671 23 10

E-post: mediplast.info@mediplast.com

www.mediplast.com

Mer information hittar du på



PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstraße 3 · 82319 Starnberg · GERMANY

Tel: +49 (0)8151 279-0 · E-Mail: info@pari.de · www.pari.com