

Kort brukaranvisning för rengöring av stationär inhalator

Inhalatorn

Torka med fuktig trasa minst 1g/månad

Byt filter när det är missfärgat eller vått annars 1g/år



Nebulisator

Efter varje användning:

Plocka isär alla delar


Tvätta i varmt vatten med tvållösning/diskmedel

Skölj noga i kallt vatten

Skaka torrt

Låt lufttorka

Montera ihop

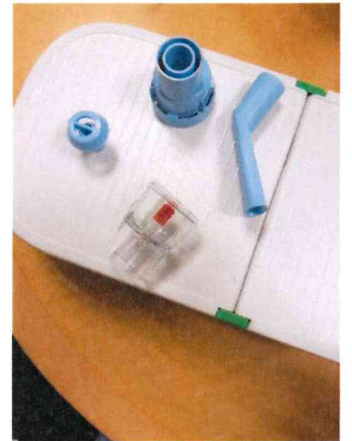

1g/v:

Plocka isär alla delar

Tvätta i varmt vatten med tvållösning

Skölj i kallt vatten


Koka i vatten med 2-3 droppar diskmedel i 10-15 minuter

Skölj noga i kallt vatten

Skaka torrt

Låt lufttorka

Montera ihop

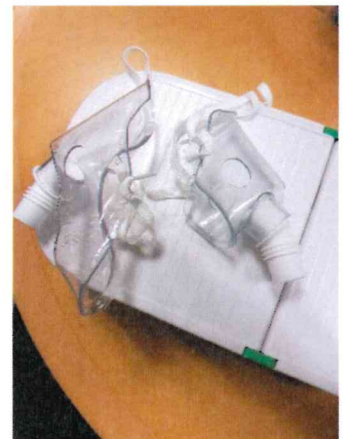

Byt efter 12 månader

Mask

Torka av masken med ren och torr trasa

Låt lufttorka

Obs! Mask och slang får ej kokas

Byt efter 12 månader

