

Kära diabetessjuksköterska/diabetesläkare,

Vi vill informera dig om en förändring i FreeStyle Libre-portföljen i Sverige.

Från och med 1 september 2024 kommer vi börja fasa ut FreeStyle Libre 2-sensorer (art.nr. 72001-01) till FreeStyle Libre 2 Plus-sensorer (art.nr. 78750-01) för alla användare i er region. FreeStyle Libre 2 Plus-sensorn är en uppdaterad sensor med nedanstående förbättringar:

- **15 dagars livslängd**
- **Godkänd för användning från 2 års ålder**
- **Förbättrad noggrannhet (MARD 8,2%)**

Den uppdaterade sensorn kommer fungera med befintlig FreeStyle LibreLink-app och med den blå FreeStyle Libre 2-avläsaren (art.nr. 71980-01). FreeStyle Libre 2 Plus-sensorn kommer ej att fungera med den svarta FreeStyle Libre-avläsaren (första generationen, art.nr. 71540-01) eftersom den produkten har utgått. Vårdgivare kan antingen förskriva en blå FreeStyle Libre 2-avläsare till dem som använder föregående version – alternativt hänvisa användare till FreeStyle LibreLink-appen som är kostnadsfri.

Alla användare kommer att få information om sin nya FreeStyle Libre 2 Plus-sensor i ett brev som bifogas med varje leverans. Tack för att du hjälper dina patienter att uppdatera till FreeStyle Libre 2 Plus-sensorer!

Välkommen att kontakta oss via order.adc@abbott.se om du önskar ytterligare support.

Med vänliga hälsningar,
Abbott Scandinavia AB

FreeStyle Libre 2 Plus

Så hjälper du din patient att komma igång med FreeStyle Libre 2 Plus

1. Om din patient har en äldre typ av avläsare eller upplever utmaningar vid start: Vänligen rekommendera start av sensorn med FreeStyle LibreLink-appen som går att ladda ner till smartphone kostnadsfritt från App Store (iPhone) eller Google Play (Android).

Här hittar du mer information om vilka telefonmodeller som fungerar med FreeStyle LibreLink-appen samt vilken operativsystemsversion man behöver ha installerad:

www.freestyle.abbott/se-sv/freestyle-stod/kompatibilitetsguide



2. Alternativet till ovanstående är att beställa en blå avläsare: FreeStyle Libre 2-avläsare (art. nr. 71980-01).
3. Man bör känna till att FreeStyle Libre 2 Plus-sensorn behöver bytas efter 15 dagar, men avläsaren/appen påminner också om detta.
4. Om din patient inte kan aktivera sensorn: Be dem kontakta kundtjänst på telefonnummer 020-190 11 11.
5. Vid behov: Kontakta er Abbott-representant för ytterligare support.



Live-genomgång av FreeStyle Libre 2 Plus-sensorn

Din patient kan delta i våra live webinarer för att få mer information om FreeStyle Libre 2 systemet. Patienten kan registrera sig via länken nedan eller genom att skanna QR koden. www.freestyle.abbott/se-sv/upptack/webbinarier

