

## Bästa FreeStyle Libre 2-användare,

Vi har en positiv nyhet att dela med oss av!

Från och med 1 september 2024 kommer vi att börja fasa ut våra FreeStyle Libre 2-sensorer i Sverige – och du kommer istället att få vår uppdaterade FreeStyle Libre 2 Plus-sensor. FreeStyle Libre 2 Plus-sensorn skiljer sig mot föregående modell genom följande förbättringar:

- **15 dagars livslängd**
- **Godkänd för användning från två års ålder**
- **Förbättrad noggrannhet (MARD 8,2%)**

Använder du en svart avläsare (äldre modell) behöver den bytas ut till den blå FreeStyle Libre 2-avläsaren för att fungera med din nya sensor. Kontakta din förskrivande läkare/sköterska för mer information om avläsarbyte. Istället för avläsare kan man välja att använda vår kostnadsfria FreeStyle LibreLink-app på sin smarttelefon.

Vid övriga frågor: Vänligen kontakta vår kundtjänst på mail ([diabetes.sverige@abbott.se](mailto:diabetes.sverige@abbott.se)) eller telefon (020-190 11 11).

Med vänliga hälsningar,  
Abbott Scandinavia AB

# FreeStyle Libre 2 Plus

## Så här kommer du igång med FreeStyle Libre 2 Plus

1. Om du har en äldre typ av avläsare, eller upplever utmaningar vid start, rekommenderar vi att istället starta sensorn med FreeStyle LibreLink-appen. FreeStyle LibreLink går att ladda ner till smartphone kostnadsfritt från App Store (iPhone) eller Google Play (Android).

Här hittar du mer information om vilka telefonmodeller som fungerar med FreeStyle LibreLink-appen samt vilken operativsystemsversion man behöver ha installerad:

[www.freestyle.abbott/se-sv/freestyle-stod/kompatibilitetsguide](http://www.freestyle.abbott/se-sv/freestyle-stod/kompatibilitetsguide).



2. Alternativ till ovanstående: Kontakta din läkare/sköterska för vidare instruktion.
3. Notera att FreeStyle Libre 2 Plus-sensorn behöver bytas efter 15 dagar. Avläsaren/appen uppmärksammar dig när det är dags för byte.
4. Om du inte kan aktivera sensorn: Kontakta kundtjänst på mail ([diabetes.sverige@abbott.se](mailto:diabetes.sverige@abbott.se)) eller telefon (020-190 11 11).



### Live-genomgång av FreeStyle Libre 2 Plus-sensorn

Vill du veta mer om FreeStyle Libre 2-systemet?

Registrera dig på länken nedan eller genom att skanna QR koden.

[www.freestyle.abbott/se-sv/upptack/webbinarier](http://www.freestyle.abbott/se-sv/upptack/webbinarier)

