

Hjälpmiddelsentrum utbildar

Antidecubitusmadrasser



Kursansvarig hjälpmedelskonsulent

Eva Scharin

Telefon: 021-17 58 57

E-post: eva.scharin@regionvastmanland.se

Hösten 2021

Innehållsförteckning

Produktinformation Antidecubitusmadrasser	3
Kriterier för förskrivning.....	3
Förskrivare.....	3
Kostnadsansvar	3
Fakta om trycksår	4
Riskfaktorer	4
Förebygga trycksår	4
Fibermadrass 3-delad.....	5
Optimal 5zon BM.....	6
CuroCell SAM.....	7
CuroCell SAM Pro	8
CuroCell 3 CX13	9
CuroCell A4 CX10.....	10
CuroCell 4 pro.....	12
CuroCell A4 CX15.....	13
Statisk luftmadrass 4-delad.....	14
Utgången sortiment	15
CuroCell Nova CX 13.....	15
Prevento Bas.....	16
Prevento Plus.....	17
Sof Care	18

Produktinformation Antidecubitusmadrasser

(Utdrag ur Hjälpmedelshandboken)

ISO-kod 04 33 06

Kriterier för förskrivning

Förskrivs för att förebygga eller behandla trycksår.

Madrass i förebyggande syfte: Madrass för att användas i förebyggande syfte bör vara förstahandsval innan eventuellt sår uppkommit (sårkategori 1, 2).

Madrass i behandlande syfte: Behandlande madrass kan förskrivas då trycksår uppstått eller då risken för trycksår är hög (sårkategori 2, 3, 4).

Förskrivning av avancerad antidecubitusmadrass (sårkategori 4) styrs av det medicinska behovet.

Låg basmadrass (distansmadrass) kan förskrivas som tillbehör, om patienten använder sänggrindar, för att minska den totala madrasshöjden.

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska.

Gäller för förskrivning av madrass i förebyggande eller i behandlande syfte.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Fakta om trycksår

Trycksår klassificeras enligt [EPUAP](#) (European Pressure Ulcer Advisory Panel) i en fyrgradig skala:

Kategori I: kvarstående rodnad, som inte bleknar vid tryck

Kategori II: delhudsskada, blåsa eller ett ytligt öppet sår

Kategori III: fullhudsskada utan sårhåla

Kategori IV: djup fullhudsskada med sårhåla där ben, sena eller muskel syns

Riskfaktorer:

- Oförmåga att röra sig
- Nedsatt allmäntillstånd
- Nyopererad
- Dåligt näringsintag
- Feber, infektion
- Smärttillstånd

Förebygga trycksår:

- Bedöm trycksårsrisken
- Bedöm huden
- Minska tryck
- Håll huden torr, mjuk och smidig
- Tillgodose och följ upp närings- och vätskebehov
- Informera patient och närstående
- Informera nästa vårdgivare vid överflyttning

Fibermadrass 3-delad

(f.d. Liljenberg-madrassen)

Firma: Comco



Mjukfiber bäddmadrass, läggs ovanpå basmadrass. Speciellt lämplig för magra, lätta patienter.

Sesam-nr: 15222*
Kategori: Förebyggande
Material: Siliconiserade fibrer
Brukarvikt: Max 75 kg

OBS! Försäljningsvara, skall ej återlämnas till HMC.

Optimal 5zon BM

Firma: Care of Sweden



Optimal 5zon BM är en bäddmadrass, läggs ovanpå befintlig basmadrass.

Sesam-nr:	34420
Kategori:	Förebyggande
Mått:	90x200x10 cm
Material:	Skumkärna med vätsketätt överdrag.
Brukarvikt:	Max 130 kg

S-nr 34673: Optimal 5zon BM 105 cm bred.

CuroCell SAM

Firma: Care of Sweden



Statisk luftmadrass, läggs ovanpå basmadrass.

OBS! Utgått ur sortiment. Kan endast förskrivas vid tillgång på lager. Ersätts från 2021 vid nyinköp av CuroCell SAM Pro.

Sesam-nr: 37509 (madrass inkl kompressor)

Kategori: T.o.m. sårkategori 2

Mått: 90x200x10 cm

Material: Luftfylld cellkärna

Brukarvikt: 200 kg

S-nr 37511: CuroCell SAM 105 cm bred.

CuroCell SAM Pro

Firma: Care of Sweden



Statisk luftmadrass med pump, läggs ovanpå basmadrass.

Sesam-nr: 41842 (kompl madrass inkl pump)

Kategori: T.o.m. sårkategori 3

Mått: 90x200x10 cm

Material: Luftfylld cellkärna

Brukarvikt: 250 kg

S-nr 41843: CuroCell SAM Pro 105 cm bred.

CuroCell 3 CX13

Firma: Care of Sweden



Växeltrycksmadrass med pump. Lägg på basmadrass.

*OBS! Utgått ur sortiment. Kan endast förskrivas vid tillgång på lager.
Ersätts från 2021 vid nyinköp av CuroCell A4 CX10.*

Sesam-nr: 34513 (kompl madrass inkl pump)

Kategori: T.o.m. sårgrad 3

Mått: 90x200x13

Brukarvikt: 160 kg

S-nr 34518: CuroCell 3 CX13 105 cm bred (beställningsvara).

CuroCell A4 CX10

Firma: Care of Sweden



Växeltrycksmadrass med pump/kontrollenhet. Läggts ovanpå basmadrass.

Ny i sortiment, upphandlad 2021. Ersätter CuroCell 3 CX13 vid nyinköp.

Sesam-nr: 41840 (kompl madrass inkl pump)

Kategori: T.o.m. sårkategori 4

Mått: 90x200x10 cm

Brukarvikt: 0-200 kg

CuroCell A4 CX10 är helautomatisk, ingen inställning av brukarvikt behövs.

S-nr 41841: CuroCell A4 CX10, 105 cm bred (beställningsvara)

Distansmadrass Prima 6

Firma: Care of Sweden



6 cm låg basmadrass, används under luftmadrass för sänka den totala madrasshöjden och därmed få mer grindhöjd på vårsäng.

Sesam-nr: **42012** Mått 90x200x6 cm (lagervara)

Sesam-nr: **42013** Mått 105x200x6 cm (beställningsvara)

Brukarvikt: Max 130 kg.

CuroCell 4 pro

Firma: Care of Sweden



Växeltrycksmadrass med pump.

OBS! Utgått ur sortiment. Kan endast förskrivas vid tillgång på lager.

Sesam-nr: 34659 (kompl madrass inkl pump)

Kategori: T.o.m. sårkategori 4

Mått: 90x200x21 cm

Brukarvikt: 200 kg

S-nr 36995: CuroCell 4 Pro, 105 cm bred (beställningsvara)

OBS! Lägg direkt på sängbotten! Ingen basmadrass under behövs.

CuroCell A4 CX15

Firma: Care of Sweden



Växeltrycksmadrass med pump/kontrollenhet.

Ny i sortiment, upphandlad 2021. Ersätter CuroCell 4 vid nyinköp.

Sesam-nr: 42099 (kompl madrass inkl pump)

Kategori: T.o.m. sårkategori 4

Mått: 90x200x15 cm

Brukarvikt: 0-200 kg

CuroCell A 4 CX 15 är helautomatisk, ingen inställning av brukarvikt behövs.

S-nr 42100: CuroCell A4 CX15 105 cm bred.

OBS! Lägg direkt på sängbotten! Ingen basmadrass under behövs.

Statisk luftmadrass 4-delad

Firmor: Permobil och Etac



Statisk madrass med luftfyllda celler. Läggas ovanpå basmadrass.

Madrassdelarna pumpas upp individuellt med medföljande handpump, knäpps sen ihop med tryckknappar.

Sesam-nr: 16589 Roho madrass (svart, från Permobil). Upphandlad, ersätter vid nyinköp:

Sesam-nr: 38109 Starmatt madrass (gul, från Etac)

Kategori: T.o.m. sårkategori 4

Mått: 86x49x8,5 cm/del **OBS! Önskas hel madrass beställs 4 delar.**

Brukarvikt: Obegränsad

Utgången sortiment

CuroCell Nova CX 13

Firma: Care of Sweden



Växeltrycksmadrass. Läggts ovanpå basmadrass.

OBS! UTGÅNGEN, KAN EJ FÖRSKRIVAS.

Sesam-nr: 34512 (kompl madrass inkl pump)

Kategori: T.o.m. sårkategori 2

Mått: 90x200x13

Brukarvikt: 150 kg

S-nr 34519: CuroCell Nova CX13 105 cm bred.

Prevento Bas

Firma: Parir AB



Växeltrycksmadrass. Läggts ovanpå basmadrass.

OBS! UTGÅNGEN, KAN EJ FÖRSKRIVAS.

Sesam-nr: 17300 (kompl madrass inkl pump)

Kategori: T.o.m. sårkategori 2

Material: Polyurethan

Brukarvikt: 30-120 kg

Prevento Plus

Firma: Parir AB



Växeltrycksmadrass. Läggts ovanpå basmadrass.

OBS! UTGÅNGEN, KAN EJ FÖRSKRIVAS.

Sesam-nr: 17301 (inkl kompressor)

Kategori: T.o.m. sårkategori 3

Material: Polyurethan

Brukarvikt: 140 kg

Sof Care

Firma: Gate Rehab



Statisk luftmadrass. Läggs ovanpå basmadrass.

OBS! UTGÅNGEN, KAN EJ FÖRSKRIVAS.

Sesam-nr: 14902 (kompl madrass inkl pump)

Kategori: T.o.m. sårkategori 2-3

Material: Polyurethan/PVC

Brukarvikt: 300 kg