

Hjälpmedelscentrum utbildar

Gång- & skyddshjälpmedel



Ansvarig hjälpmedelskonsulent

2025

Britta Johnsson, telefon: 021-174463

hmc.forflyttningshjalpmedel@regionvastmanland.se

Åsa Pettersson, telefon: 021-176867

hmc.forflyttningshjalpmedel@regionvastmanland.se

Innehåll

Förskrivningsregler	4
Artikelansvar (tidigare nivåindelning):	4
Förskrivningskriterier (urval)	5
Ersättningskedjor	5
Gånghjälpmedel	6
Rollatorer aktivt sortiment.....	6
Rebel	6
Carl-Oskar	6
Fellow	9
Topro Troja original.....	10
Rollatorer, utgående sortiment (köps inte in).....	11
Futura	11
Futura med enhandsbroms.....	11
Futura med HP-handtag	11
Futura med tvärhandsgrepp.....	12
Gemino 20	13
Bakåtvända rollatorer till vuxen patient	13
RA-rollatorer	14
RA-rollator Rebel, Staffan och Carl-Oskar	14
Alpha Basic RA.....	15
Gåbord med patientbroms.....	16
Gåbord Rebel, Staffan och Carl-Oskar	16
Alpha Basic GB.....	16
Gåbord Bure.....	17
Bure el, Bure gasfjäderhöjt, Bure double 2.0 samt Bure space .	17
Bure Rise & go.....	20
Övriga Gånghjälpmedel	22
Fyrpunktsstöd.....	22
Betastöd	22
Axillarkryckor	22
RA-kryckor	23
Gånghjälpmedel för tyngre brukare	24
Rollator Carl-Oskar, förstärkt modell.....	24
Server HD	24
Maxi plus.....	25
Gåbord Bure el XL	25
RA-Support	26
Kryckkäpp	27
Fyrpunktsstöd	27
Betastöd	27
Gåstol.....	28
Meywalk 2000.....	28
Meywalk 4 (tidigare MK4)	30
Mustang.....	31

Dynamic Pacer	32
Värdbälten.....	33
Modeller	33
Flexibelt, Hug	33
Easybelt, Hug.....	34
EasyBelt.....	34
Modeller	34
FlexiBelt	35
Modeller	35
Höftskyddsbyxor.....	36
SafeHip airX Unisex	36
SafeHip AirX open.....	36
SafeHip Active.....	36
Hjälmor.....	37
Mjuk hjälm Ribcap	37
Skyddskeps Bowie.....	37
Skyddsmössa Lenny Antracit.....	38
Skyddsmössa Iggy Randig	38
Skyddsmössa Lenny Summer	38
Skyddsmössa Billie Cream	38
Skyddshjälm Hardy	39
Hård hjälm Hea.....	39
Mjuk hjälm Toppen.....	40

FÖRSKRIVNINGSGREGLER

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):

Artikelansvar (tidigare nivåindelning):	
Ansvar 1	Regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmedel som är komplexa och kostsamma till exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till dessa.
Ansvar 2	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedel är manuella rullstolar och rollatorer.
Ansvar 3	Rekviritions-hjälpmedel. Enklare hjälpmedel som inte förskrivs via Hjälpmedelscentrum. Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmedlen är försäljningshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Hjälpmedel som används i hemsjukvård betalas av Region Västmanland. Exempel på hjälpmedel är badbräda och förhöjningsklossar.
Ansvar 4	Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Kommunen har betalningsansvar för patienter som bor i särskilda boendeformer men beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedlen är omvårdnadshjälpmedel som personlyftar, dusch- och toalettstolar på hjul och reglerbara sängar.

Förskrivningskriterier (urval)

(Se hjälpmedelshandboken för kompletta kriterier)

Artikel	Kriterier/utprovningsrutin	Kommentarer
Gånghjälpmedel som hanteras med en arm (käpp, kryckkäpp, bock, RA-krycka, axillarkrycka)	Kompensera nedsatt gångförmåga.	Patient betalar käpp och kryckkäpp själv, säljs via ex Varsam och Klädvalet. Underarmskrycka och axillarkrycka kan förskrivas
Betastöd (gångstativ)	Kompensera nedsatt gångförmåga. Behov av stabilitet.	
Rollatorer	Kompensera nedsatt gångförmåga, när enklare hjälpmedel är otillräckliga. Rollator nr 3 är egenansvar.	Låneavgift för rollator nr 2 är 500 kr (S-09547, avvakta med att lägga in avgiften tills efter utvärderingen). Rollator nr 3 kan privathyras, kontakta HMC's kundtjänst för mer info.
Gåbord	Kompensera nedsatt gångförmåga, när enklare hjälpmedel är otillräckliga.	RA-rollator likställs med gåbord.
Gåstol	Gåstol kan förskrivas för att kompensera nedsatt gångförmåga när enklare gånghjälpmedel inte ger tillräckligt stöd. Provas ut i samråd med hjälpmedelskonsulent.	
Bälten	Hjälp vid förflyttning och uppresning.	Är hyreshjälpmedel
Höftskyddsbyxor	Skydd vid fall. Till patienter med fallhistorik, benskörhet mm	Försäljningsartikel max tre kan förskrivas/år.
Hjälmar	Skydd vid fall.	Försäljningsartikel

Ersättningskedjor

Ersättningsgrupper används för att föreslå alternativa/ersättningsartiklar för att på så sätt använda artiklar i lager först.

Ersättningskedja

Vid beställning av en ny artikel som ersatt en artikel som utgått ur sortiment föreslår webSesam den utgånga artikeln som ersättningsartikel, förutsatt att den finns i lager. Detta byte kan vara tvingande eller frivilligt. Om du som förskrivare inte accepterar ett tvingande byte skickas blankett Förskrivning av hjälpmedel in i uppladdningstjänsten med motivering till varför föreslagen artikel inte accepteras.

Alternativ artikel

Vid beställning av en artikel som inte finns i lager för leverans, visar webSesam likvärdiga alternativ.

GÅNGHJÄLPMEDEL

Rollatorer aktivt sortiment

Vid förskrivning av **rollator nummer två** ska artikel 09547 läggas (låneavgift 500kr). Om det vid utprovning är osäkert om patienten kommer att behålla två rollatorer, ska låneavgiften registreras i samband med uppföljning. OBS! Kom ihåg att informera patienten om avgiften.

Rebel

Leverantör www.humancare.se

Standardrollator och ska väljas i första hand för inom- och utomhusbruk om den fungerar.

Rollator markerad med fet stil är standardmodell.

Modeller

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
148 85 Rebel 57 Smal	75-93 cm	57 cm	62 cm	37 cm	9,5 kg	140 kg
148 87 Rebel 62*	75-93 cm	62 cm	62 cm	42 cm	9,6 kg	140 kg
419 53 Rebel 62 Låg	68-86 cm	62 cm	54 cm	42 cm	9,4 kg	140 kg
364 58 Rebel 67 Bred	75-93 cm	67 cm	62 cm	47 cm	9,7 kg	140 kg
419 38 Rebel 67 Hög+bred	82-100 cm	67 cm	62 cm	47 cm	9,7 kg	140 kg

*= Finns som färdig med enhandsbroms. Artikel.nr 421 01 för höger och 421 02 för vänster.

OBS! Artikelnummer för rollatorer anpassade med hemiplegihandtag/tvärhandtag finns på nästa sida.



Carl-Oskar

Leverantör www.humancare.se

För utomhusbruk.

Modeller

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sitsbredd	Vikt	Max brukarvikt
327 68 C-O 57 smal	77-95 cm	57 cm	64 cm	37 cm	11,1 kg	150 kg
105 34 C-O 62 std*	77-95 cm	62 cm	64 cm	42 cm	11,3 kg	150 kg
419 54 C-O 62 hög	82-100 cm	62 cm	64 cm	42 cm	11,3 kg	150 kg
105 35 C-O 67	77-95 cm	67 cm	64 cm	47 cm	11,4 kg	150 kg
113 13 C-O 72	77-95 cm	72 cm	64 cm	52 cm	11,5 kg	150 kg

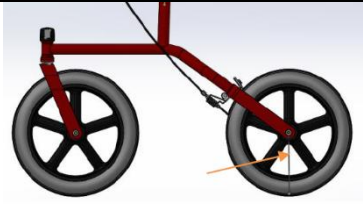
*= Finns som färdig med enhandsbroms; höger: 331 02 vänster: 331 03

OBS: Det finns ingen Rollator Carl-Oskar med låga handtag eller lägre sitthöjd.



Tillbehör Rebel och Carl-Oskar

Ryggband Art.nr 142 01 stl 57, 62, 67 cm Art.nr 45475 stl 72	
Enhandsbroms Art.nr 151 52	
Syrgashållare Art.nr 117 05	
Släpbroms Art.nr 129 63	
Steghjälp Underlättar att ta sig över trottoarkant etc. Art.nr 327 58	
Underarmsstöd/hemiplegihandtag Kan ej monteras på Rebel/ C-O 57 cm bred Art.nr 393 17, Vänster Art.nr 393 18, Höger Färdiga art.nr för rollator med hemiplegihandtag monterat: 46294 Rebel 62 med hemi hö, enhandsbroms vä 46295 Rebel 62 med hemi vä, enhandsbroms hö	
Tvärhandtag med enhandsbroms (bromsas på vänster sida) Förskrivs via uppladdningstjänst. Art.nr: 44941 <i>Passar endast 62 cm bred rollator.</i> Färdiga art.nr för rollator med tvärhandtag monterat: 462 92 Rebel 62 med enhandsbroms hö 462 93 Rebel 62 med enhandsbroms vä	
Mjukgrepp Art.nr 391 78, kommer som styck. Monteras av tekniker (arbetsorder).	

Antistat wire till Carl-Oskar & Rebel Art.nr 406 09 Motverkar att patienten får stötar av rollatorn. Arbetsorder till tekniker för montering	
Droppställning Art.nr 427 47 Tre motvikter medföljer för montering.	
Luftpumpade Hjul Carl-Oskar OBS! Inget som rekommenderas.	Betalas av brukaren (egenansvar) <u>Kostnad (cirkapris)</u> 1250 kr (montering) + Hjul (490*4) = 3210 kr
Dragögla till ihopfällningsmekanik, reservdel Art.nr 186 49 Vid enskilda patientärenden; skriv arbetsorder till tekniker och be att få reservdelen skickad.	
Korg, bricka, väska och kryckkäppshållare	Betalas av brukaren (egenansvar)

Fellow

Leverantör www.humancare.se

Framåtvända handtag. Finns på avtal igen, kan förskrivas om vår standardrollator

Rebel inte fungerar.



Modeller

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
327 69 Fellow std	77-95 cm	63 cm	59 cm	44 cm	8 kg	150 kg
327 70 Fellow låg	68-80,5 cm	62 cm	50,5 cm	44 cm	7,7 kg	130 kg
327 71 Fellow hög	82-100 cm	62,5 cm	64 cm	44 cm	8,1 kg	130 kg

Tillbehör Fellow

Ryggband Art.nr 327 53	
Enhandsbroms Art.nr 327 54 Höger Art.nr 327 55 Vänster	
Syrgashållare Art.nr 108 18	
Släpbroms Art.nr 343 95 (par)	
Steghjälp Art.nr 327 52	
Droppställning Art.nr 134 41	
Tvärhandtag med enhandsbroms (bromsas på vänster sida) Art.nr 455 59	
Korg, bricka, väska och kryckkäpphållare	Betalas av brukaren (egenansvar)

Topro Troja original

Leverantör: www.topromobility.se

Lättviktsrollator, kan förskrivas om vår standardrollator Rebel inte fungerar.

Levereras utan korg.



Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
457 63 Troja original X (extra small)	64-79 cm	51 cm	52 cm	36 cm	6,1 kg	130 kg
457 62 Troja Original S	69-86 cm	60 cm	55 cm	45,5 cm	6,6 kg	165 kg
449 85 Troja Original M passar personer med längd 150- 200 cm	78–100 cm	60 cm	62 cm	45,5 cm	6,8 kg	165 kg

Tillbehör Topro:

Enhandsbroms Art.nr: 454 69	
Ryggband Kort, 68 cm: Art.nr: 454 72 Långt, 76 cm: Art.nr: 454 71	
Droppställning Art.nr: 454 68	
Släpbroms Art.nr: 454 70 (par)	
Korg, bricka, väska och kryckkäpphållare	Betalas av brukaren (egenansvar)

Rollatorer, utgående sortiment (köps inte in)

Futura

Leverantör www.invacare.se/sv

Ej längre förskrivningsbar i webbsam. Går att förskriva via uppladdningstjänst men med trolig väntetid.



Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
093 89 Futura 45	64-79 cm	60 cm	47,5 cm	42 cm	7,6 kg	150 kg
093 88 Futura 52	71-85 cm	61 cm	54,5 cm	42 cm	7,8 kg	150 kg
093 86 Futura 60	79-93 cm	61 cm	62 cm	42 cm	8 kg	150 kg
093 87 Futura 68	86-101,5 cm	64 cm	70,5 cm	42 cm	8,2 kg	150 kg

Futura med enhandsbroms

Utgående, kan förskrivas i mån av tillgång.

Modell	Art. nr broms vänster sida	Art.nr broms höger sida
Futura 52	364 15	364 14
Futura 60	329 09	329 08
Futura 68	364 33	364 32



Futura med HP-handtag

Utgående, kan förskrivas i mån av tillgång.

Modell	Art.nr HP-handtag vänster sida	Art.nr HP-handtag höger sida
Futura 52	154 53	154 52
Futura 60	120 57	120 56
Futura 68	154 55	154 54



Futura med tvärhandsgrepp

Utgående, kan förskrivas i mån av tillgång.

Modell	Tvärhandsgrepp, bromsas med höger hand, art.nr
Futura 60	329 51
Futura 68	329 53

Modell	Tvärhandsgrepp, bromsas med vänster hand, art.nr
Futura 60	329 50
Futura 68	329 52



Tillbehör Futura:

Ryggband Art.nr 097 92	
Enhandsbroms Art.nr 100 04 Höger Art.nr 100 05 Vänster	
Syrgashållare Art.nr 139 85	
Släpbroms Art.nr 115 41	
Steghjälp Underlättar att ta sig över trottoarkant etc. Art.nr 128 01	
Korg, bricka, väska och kryckkäppshållare	Betalas av brukaren (egenansvar)

Gemino 20

Leverantör www.sunrisemedical.se

Lättviktsrollator. Levereras utan korg

Utgående, kan förskrivas i mån av tillgång, ersättningskedja aktiveras om ej finns i lager.



Modeller

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
377 23 Gemino 20, S	65-77 cm	55 cm	48 cm	42 cm	6,6 kg	125 kg
377 22 Gemino 20	78-100 cm	60 cm	62 cm	47 cm	7,1 kg	150 kg
377 24 Gemino 20, M	69-88 cm	60 cm	55 cm	47 cm	7 kg	130 kg

Tillbehör Gemino 20

Enhandsbroms Art.nr 377 25	
Ryggband Art.nr 431 47	
Droppställning Art.nr 432 30	
Korg, bricka, väska och kryckkäpphållare	Betalas av brukaren (egenansvar)

Bakåtvända rollatorer till vuxen patient

Kontakta konsulent för sortiment, utprovning och förskrivning.

RA-rollatorer

RA-rollator Rebel, Staffan och Carl-Oskar

Leverantör www.humancare.se



Rebel RA



Rebel RA med sits



Staffan (endast inomhus)



Carl-Oskar

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Vikt	Max brukarvikt
419 37 Rebel RA 67 Låg*	86–104 cm	67 cm	11,3 kg	125 kg
462 77 Rebel RA 67 Låg med sits	86–104 cm	67 cm		125 kg
124 51 Rebel RA 67 std**	106–124 cm	67 cm	11,5 kg	125 kg
462 68 Rebel RA 67 STD med sits	106–124 cm	67 cm		125 kg
106 63 Staffan RA Låg Utgående	86–108 cm	59 cm	10,3 kg	90 kg
419 26 C-O RA 67 låg	95-113 cm	67 cm	13,0 kg	125 kg
462 79 C-O RA 67 låg med sits	95-113 cm	67 cm		125 kg
105 36 C-O RA 67 std***	107-126 cm	67 cm	13,2 kg	125 kg
462 78 C-O RA 67 std med sits	107-126 cm	67 cm		125 kg
359 73 C-O RA 72	107-126 cm	72 cm	13,3 kg	125 kg

*= Finns som färdig med höger och vänster enhandsbroms, 427 00 & 427 01

**= Finns som färdig med höger och vänster enhandsbroms, 332 04 & 332 05

***= Finns som färdig med höger och vänster enhandsbroms, 344 70 & 344 71

För tillbehör se nästa sida

Tillbehör:

Se tillbehör Rebel och Carl-Oskar

Övriga tillbehör	Kommentar
Armstödsrör kort 67 art.nr 326 32 Armstödsrör kort 72 art.nr 326 38	Sänker min och max höjden med 15 cm. OBS! kommer i styck! Passar ej till låga modeller.
Enhandsbroms artikelnummer 151 53	Förskrivs via uppladdningstjänsten (ange vilken sidan bromsen ska monteras på).
Sits med grind 67 artikelnummer 172 08 Sits med grind 72 artikelnummer 419 09	Förskrivs via uppladdningstjänsten. Kan vara svår att sitta på pga underarmsstöden.

Alpha Basic RA

Leverantör www.invacare.se

Utgående, kan förskrivas i mån av tillgång, ersättningskedja aktiveras om ej finns i lager.



Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
129 61 Alpha Basic*	104-122 cm	66 cm	62 cm	43 cm	11,3 kg	125 kg

* Finns som färdig med höger och vänster enhandsbroms, art.nr 152 82 & 152 81

Tillbehör Alpha Basic RA:

Se tillbehör rollator Futura förutom:

Enhandsbroms vä Art.nr 133 75 Enhandsbroms hö Art.nr 133 74	Skriv arbetsorder till tekniker för montering.
--	--

Gåbord med patientbroms

Gåbord Rebel, Staffan och Carl-Oskar

Leverantör: www.humancare.se



Rebel



Staffan (endast inomhus)



Carl-Oskar

Art.nr	Höjd	Bredd	Vikt	Max brukarvikt
104 88 Staffan låg Utgående, kan förskrivas i mån av tillgång	86-108 cm	62 cm	11,7 kg	90 kg
419 39 Rebel Låg	86-104 cm	67 cm	12,8 kg	125 kg
124 50 Rebel STD	104-122 cm	67 cm	12,8 kg	125 kg
105 37 C-O 67	107-126 cm	67 cm	14,7 kg	125 kg
367 92 C-O 72	107-126 cm	72 cm	14,8 kg	125 kg

Tillbehör:

Se tillbehör rollator Rebel & Carl-Oskar och RA-rollator Rebel, Staffan och Carl-Oskar. OBS: sits kan inte sittas på pga gåbordsöverdelen.

Alpha Basic GB

Leverantör: www.invacare.se

Utgående, kan förskrivas i mån av tillgång, ersättningskedja aktiveras om ej finns i lager.

Art.nr	Höjd	Bredd	Vikt	Max brukarvikt
138 24 Alpha basic	99-126 cm	65 cm	12,8 kg	125 kg



Tillbehör:

Se tillbehör Futura & Alpha Basic RA

Gåbord Bure

Leverantör: www.directhealthcaregroup.com

Bure el, Bure gasfjäderhöjt, Bure double 2.0 samt Bure space



Bure el



Bure gasfjäderhöjt



Bure double 2.0



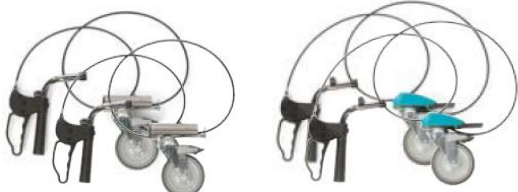
Bure space

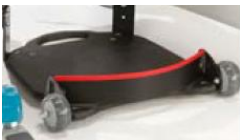
Modeller

Art.nr	Höjd	Bredd	Vikt	Max brukarvikt	Golv - underrede
437 54 Bure el Hjul 125 mm	91-131 cm	78 cm	25 kg	150 kg	Ca 22 cm
437 81 Bure el Hjul 75 mm	86-126 cm	78 cm	25 kg	150 kg	Ca 17 cm
436 71 Bure double 2.0 Hjul 125 mm	90-130 cm	70-95 cm	29 kg	150 kg	Ca 19 cm
430 82 Bure & double 2.0 Hjul 75 mm	85 – 125 cm	70-95 cm	29 kg	150 kg	Ca 14,5 cm
323 46 Bure gasfjäderhöjt Hjul 125 mm	91-129 cm	78 cm	19 kg	150 kg	
437 86 Bure el low Hjul 75 mm	70-95 cm	78 cm	-	150 kg	Ca 22 cm
354 95 Bure el smal Hjul 125 mm	91-131 cm	66 cm	24 kg	150 kg	Ca 22 cm
454 06 Bure space Kontakta konsulent	90-130 cm	78/67 cm		150 kg	

OBS: Artikelnummer för färdiga gåbord med handbroms se nästa sida under handbromstillsats

Tillbehör

Syrgashållare Art.nr 180 37	
Droppställning Art.nr 364 06	
Höj och sänkreglage i handtaget Kontakta konsulent, finns enstaka exemplar. Utgått leverantör.	
Handbromstillsats Bure manuell/gas/el/smal/XL 75 mm hjul: Art.nr 460 94 125 mm hjul: Art.nr 410 35 Bure Double 2.0 75 mm hjul: Art.nr 383 43 125 mm hjul: Art.nr 383 44 OBS! Alla tillsatser bygger 0,5–1 cm extra i sidled. Kan inte monteras på gåbord med höj- och sänkreglage i handtaget. Passar bara till gåbord som är tillverkade från 2016 och framåt. Kontakt med konsulent krävs. Följande gåbord finns färdiga med handbroms (två händer): Art.nr: 344 35 Bure El 125 mm hjul Art.nr: 361 49, 461 30 Bure smal 125 mm hjul Art.nr: 423 46 Bure Double 2.0 125 mm hjul Art.nr: 43177 Bure Double 2.0 75 mm hjul	 41035 38344

Ståplatta till Bure Double 2.0 (rise & go double) Svängbara hjul Art.nr 382 74 Kort m svängbara hjul Art.nr 382 76 Lång m svängbara hjul Raka hjul (utgående, levereras i mån av tillgång) Art.nr 368 82 Kort m raka hjul Art.nr 368 84 Lång m raka hjul	
Ståplatta till Övriga Bure (Ej XL eller Double 2.0) Svängbara hjul Art.nr 382 75 Kort m svängbara hjul Art.nr 382 77 Lång m svängbara hjul Raka Hjul (utgående, levereras i mån av tillgång) Art.nr 368 83 Kort m raka hjul Art.nr 368 85 Lång m raka hjul	
Hälband till ståplatta Art.nr 405 70	
Gångträningsssele Art.nr 397 49 Gångträningsssele Bure std inkl fästen Passar till: Alla utom Bure El XL Max Brukarvikt: 150 kg	
Sidostöd Art.nr 155 78 Passar till: Alla modeller	
Knästöd Art.nr 393 63 OBS! Passar ej Bure XL	
Hjul Art.nr 376 42, 75 mm Art.nr 180 02, 125 mm Välj i första hand redan färdigt gåbord med önskad storlek på hjul. Hjulen kommer som styck och måste läggas som komponenter för att bli påmonterade.	



Bure Rise & go

Leverantör: www.directhealthcaregroup.com

Komponenter som ingår: Ståplatta art.nr 382 75 eller 382 74 (till double) och uppresningssele art.nr 338 60. Knästöd ingår alltid och går ej att välja bort.

Modeller

Art.nr	Höjd	Bredd	Max brukarvikt	Golv - underrede
336 26 Ej benspridning 125 mm hjul (Utgående)	97-137 cm	77 cm	150 kg	19 cm
437 55 Bure double Rise & Go 75 mm hjul	89-129 cm	66-106 cm	150 kg	14,5 cm
454 74 Bure double Rise & Go 125 mm hjul	90-130 cm	66-106 cm	150 kg	19,5 cm

Tillbehör

Uppresningsselar (ingår): Art.nr 338 61 Storlek S, Midjemått 95–105 cm Art.nr 338 60 Storlek M, Midjemått 105–120 cm Art.nr 338 59 Storlek L, Midjemått 110–140 cm Art.nr 381 68 Storlek XL, Midjemått 130–160 cm Max Brukarvikt: 150 kg	
Gåsele Art.nr 389 86 Gåträningskit komplett med fästen Max Brukarvikt: 150 kg	
Sidostöd Art.nr 155 78 Passar till: Alla modeller	
Syrgashållare Art.nr 180 37	
Droppställning Art.nr 364 06	

Ståplatta till Övriga Bure (Ej XL eller Double 2.0) (rise & go utan benspridning) Svängbara hjul Art.nr 382 75 Kort m svängbara hjul Art.nr 382 77 Lång m svängbara hjul Raka Hjul (utgående, levereras i mån av tillgång) Art.nr 368 83 Kort m raka hjul Art.nr 368 85 Lång m raka hjul	
Hälband till ståplatta Art.nr 405 70	
Hjul Art.nr 376 42, 75 mm Art.nr 180 02, 125 mm (standard) Välj i första hand redan färdigt gåbord med önskad storlek på hjul. Hjulen kommer som styck och måste läggas som komponenter för att bli påmonterade.	
Handbromstillsats Art.nr 410 36 Handbromstillsats Bure Rise & Go (ej benspridning) 125 mm hjul Art.nr 410 39 Handbromstillsats Bure Rise & Go double 125 mm hjul Art.nr 441 87 Handbromstillsats Bure Rise & Go double 75 mm hjul OBS! Passar bara till gåbord som är tillverkade från 2016 och framåt. Kontakt med konsulent krävs.	

ÖVRIGA GÅNGHJÄLPMEDEL

Fyrpunktsstöd

Leverantör: www.swereco.se

Nya doppskor går att få från HMC.

Modeller

Art.nr	Höjd	Vikt	Max brukarvikt
036 36 Vuxen	77–97 cm	1,1 kg	120 kg
065 37 Junior	63–74 cm	1,0 kg	120 kg
104 47 Barn	48,5–58,5 cm	0,7 kg	50 kg



Betastöd

Leverantör: www.swereco.se

OBS: Får inte användas på blött underlag (dusch).

Nya doppskor går att få från HMC.

Modeller

Art.nr	Höjd	Bred	Djup	Vikt	Max brukarvikt
001 23 Vuxen	85–97 cm	60 cm	48 cm	1,7 kg	120 kg
001 24 Junior	73–85 cm	60 cm	51 cm	1,6 kg	120 kg
383 66 Barn	60–72 cm	51 cm	47 cm	1,5 kg	70 kg



Axillarkryckor

Leverantör: www.swereco.se

Nya doppskor går att få från HMC.

Art.nr	Höjd	Max brukarvikt
410 46	115–135 cm	120 kg
405 52 lång	134,5–154,5 cm	120 kg



RA-kryckor

Leverantör: www.swereco.se

Nya doppskor går att få från HMC.

Art.nr	Höjd	Max brukarvikt
001 09	95–118 cm	140 kg



Gånghjälpmedel för tyngre brukare

Rollator Carl-Oskar, förstärkt modell

Leverantör: www.humancare.se



Modeller

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
171 85 C-O 62 förstärkt	77–95 cm	62 cm	64 cm	42 cm	13,2 kg	275 kg
109 35 C-O 67 förstärkt	77–95 cm	67 cm	64 cm	47 cm	13,3 kg	275 kg
164 82 C-O 72 förstärkt	77–95 cm	72 cm	64 cm	52 cm	13,4 kg	275 kg

Tillbehör

Se tillbehör Carl-Oskar.

Server HD

Leverantör: Senses by Wihlbacka, se www.rehasensesverige.se

Förskrivning sker tillsammans med konsulent.



	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
458 46 Large	75–102 cm	68 cm	62 cm	48 cm	7,4 kg	200 kg
Medium Kontakta konsulent	67-85 cm	68 cm	53 cm	48 cm	7,1 kg	200 kg

Maxi plus

Leverantör: www.invacare.se

Utgående, kan förskrivas i mån av tillgång, ersättningskedja aktiveras om ej finns i lager.



Modeller

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
151 98 Maxi + 55	72–89,5 cm	70 cm	55 cm	52 cm	9,8 kg	200 kg
151 99 Maxi + 65	81–98,5 cm	70 cm	65 cm	52 cm	10,3 kg	200 kg

Tillbehör:

Samma tillbehör som till Futura förutom:

Ryggband Art.nr 125 42	
Enhandsbroms Art.nr 077 03 Höger Art.nr 079 01 Vänster	

Gåbord Bure el XL

Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Max brukarvikt	Golv - underrede
419 19 Bure El XL 125 mm hjul	91–131 cm	88 cm	240 kg	Ca 22 cm
75mm hjul Kontakta konsulent	86–126 cm	88 cm	240	Ca 17 cm



Tillbehör

Syrgashållare Art.nr 180 37	
Höj och sänkreglage i handtaget Art.nr 361 94 finns färdig med höj och sänkreglage.	

Handbromstillsats Art.nr 410 35 Bure XL 125 mm hjul Art.nr 460 94 Bure XL 75 mm hjul OBS! Alla tillsatser bygger 0,5–1 cm extra i sidled. Kan inte monteras på gåbord med höj- och sänkreglage i handtaget Passar bara till gåbord som är tillverkade från 2016 och framåt. Kontakt med konsulent krävs.	
Ståplatta till Bure XL Utgått leverantör, kan beställas i mån av tillgång Art.nr 347 28	
Sidostöd Art.nr 155 78	
Hjul Art.nr 376 42, 75 mm Art.nr 180 02, 125 mm (standard) Hjulen kommer som styck och måste läggas som komponenter för att bli påmonterade.	

RA-Support

Leverantör: www.superiorsweden.com

RA-rollator, levereras utan korg.

Obs! Underarmsstöden går ej att flytta in.



Art.nr	Höjd handtag	Bredd	Sitshöjd	Sittbredd	Vikt	Max brukarvikt
399 58 RA Support 71	100-130 cm	71 cm	50 cm	50,8 cm	17 kg	200 kg

Kryckkäpp

Leverantör: www.superiorsweden.com

Nya doppskor går att få från HMC

Art.nr	Höjd	Max brukarvikt
346 70 Kryckkäpp Superior vänster	68–110 cm	325 kg
346 69 Kryckkäpp Superior höger	-"-	-"-



Fyrpunktsstöd

Nya doppskor går att få från HMC

Art.nr	Höjd	Vikt	Max brukarvikt
396 01	71–93 cm	0,9 kg	270 kg



Betastöd

Nya doppskor går att få från HMC

Art.nr	Höjd	Bredd		Vikt	Max brukarvikt
338 86	76–101 cm	71 cm	-	3 kg	270 kg



Gåstol

Meywalk 2000

Leverantör: www.maydayaid.se

Standardutrustning: antitippstöd, uppåtböjd bålstödsring, fjädrar, sadel och rumpstopp.

Förskrivning sker tillsammans med konsulent.

Modell



Art.nr	Bålstöds Höjd	Bålomkrets	Längd	Bredd	Sitthöjd	Vikt	Max brukarvikt
332 13 Stl S, Grön	77–96 cm	70–105 cm	85 cm	68 cm	44-62 cm	22 kg	100 kg
114 63 Stl M, Blå	90-113 cm	70-130 cm	95 cm	68 cm	58-82 cm	25 kg	100 kg
114 62 Stl L, Blå	102-125 cm	70-130 cm	95 cm	68 cm	70-94 cm	26 kg	100 kg

Tillbehör

Bålstödsring Art.nr 145 40 Bålstödsring 70cm Rak Stl S Art.nr 145 39 Bålstödsring 70cm Uppåtböjd Stl S Art.nr 145 42 Bålstödsring 90cm Rak Stl S, M, L Art.nr 145 41 Bålstödsring 90cm Uppåtböjd Stl S, M, L Art.nr 145 44 Bålstödsring 105cm Rak Stl S, M, L Art.nr 145 43 Bålstödsring 105cm Uppåtböjd Stl S, M, L Art.nr 145 46 Bålstödsring 120cm Rak Stl M, L Art.nr 145 45 Bålstödsring 120cm Uppåtböjd Stl M, L OBS! Måste kompletteras med sidovingar.	 Uppåtböjd  Rak
Sidovingar Art.nr 339 58 Sidovingar 70 ring Meywalk S Art.nr 339 59 Sidovingar 90 ring Meywalk S Art.nr 339 60 Sidovingar 105 ring Meywalk S Art.nr 156 38 Sidovingar 90 ring Meywalk M Art.nr 156 40 Sidovingar 105 ring Meywalk M Art.nr 156 42 Sidovingar 120 ring Meywalk M Art.nr 156 39 Sidovingar 90 ring Meywalk L Art.nr 156 41 Sidovingar 105 ring Meywalk L Art.nr 156 43 Sidovingar 120 ring Meywalk L	Bild finns ej

Fjädrar Art.nr 145 47 Fjädrar vita för 20–45 kg Art.nr 145 48 Fjädrar gula för 20–65 KG Art.nr 145 49 Fjädrar blå för 65–80 KG Art.nr 145 50 Fjädrar röda för 80–100 KG Art.nr 343 20 Fjädrar grå för 100-130kg	
Antitippstöd Art.nr 121 56 Antitippstöd Meywalk 2000, S, M, L	
Fotskyddsskenor Art.nr 332 14 Fotskyddsskenor Stl S Art.nr 139 68 Fotskyddsskenor Stl M & L	 Art.nr 332 14  Art.nr 139 68
Sadel Art.nr 177 39 Limpsadel Art.nr 383 58 Minisadel Art.nr 411 42 Sadel Meywalk 2000 standard stl S med fäste Art.nr 372 33 Sadel Meywalk 2000 standard stl M & L med fäste	 Limpsadel  Minisadel  Standardsadel
Överdrag Art.nr 355 37 Överdrag till bålstödsring uppåtböjd 70cm Art.nr 355 38 Överdrag till bålstödsring uppåtböjd 90cm Art.nr 355 39 Överdrag till bålstödsring uppåtböjd 105cm Art.nr 355 40 Överdrag till bålstödsring uppåtböjd 120cm Art.nr 355 41 Överdrag till bålstödsring uppåtböjd 130cm	

Meywalk 4 (tidigare MK4)

Leverantör: www.maydayaid.se

Standardutrustning: antitippstöd, bålstödsring, fjädrar, sadel, rumpstopp, riktningsspärr, parkeringsbroms, släpbroms och bakåtspärr.
Förskrivning sker tillsammans med konsulent.



Modell

Art.nr	Bålstöds höjd m. belastning	Bålomkrets	Längd	Bredd	Sitthöjd m. belastning	Vikt	Max brukarvikt
34304 Stl M, röd	98-131 cm	70-130 cm	86 cm	62 cm	60-85 cm	32 kg	130 kg
34305 Stl L, svart	118-151 cm	70-130 cm	96 cm	66 cm	78,5-103 cm	34 kg	130 kg

Tillbehör

Bålstödsring Art.nr 343 06 Bålstödsring 70cm Art.nr 343 07 Bålstödsring 90cm Art.nr 343 08 Bålstödsring 105cm Art.nr 343 09 Bålstödsring 120cm Art.nr 343 10 Bålstödsring 130cm	
Fjädrar Art.nr 145 47 Fjädrar vita för 20-45 kg Art.nr 145 48 Fjädrar gula för 20-65 kg Art.nr 145 49 Fjädrar blå för 65-80 kg Art.nr 145 50 Fjädrar röda för 80-100 kg Art.nr 343 20 Fjädrar grå för 100-130 kg	
Fotskyddsskenor Art.nr 343 11 Fotskyddsskenor Medium MK4 Art.nr 343 12 Fotskyddsskenor Large MK4	
Bendelare Art.nr 343 13 Bendelare Meywalk MK4	
Sadel Art.nr 343 14 Limpsadel	

Art.nr 408 65 Sadel mellan Art.nr 376 04 Sadel stor Art.nr 383 58 Minisadel	Limpsadel Minisadel  Sadel mellan
Sadelöverdrag Gel Art.nr 418 76 Överdrag Stl S & mini Art.nr 418 74 Överdrag Stl M Art.nr 418 75 Överdrag Stl L	  Överdrag mellan Överdrag mini
Antitippstöd Art.nr 343 15 Antitippstöd Medium Art.nr 343 16 Antitippstöd Large	

Mustang

Leverantör: www.etac.se

Förskrivning sker tillsammans med konsultent.

Standardutrustning är bålstöd och sits.

Mer information om storlekar och tillbehör finns i förskrivarmaterial barnhjälpmedel.



Dynamic Pacer

Leverantör: www.schuchmann.se

Förskrivning sker tillsammans med konsulent.

Standardutrustning: 140 mm länkhjul med parkeringsbroms, släpbroms, backspärr och riktningsspärr.

För användning inom- och begränsad utomhusmiljö (plant underlag).



Modell

Art.nr	Armbågshöjd	Ramhöjd	Längd	Bredd	Vikt	Max brukarvikt
Stl M	61–89 cm	55–69 cm	76 cm	66 cm	12 kg	68 kg
Stl L	81–119 cm	72–98 cm	91 cm	71 cm	13 kg	91 kg
Stl XL	86–124 cm	79–104 cm	101 cm	80 cm	17 kg	113 kg

Tillbehör

Sadelsits Har följande justeringsmån: Sadeldjup: 13 cm Sadelvinkel: Framåt 7,5° och 15° Bakåt 7,5° och 15° Sadelhöjd: 22 cm	
Slingsadel Stl Small Stl Large Dyna stl S & L	
Bröststöd Stl S omkrets 36–71, höjd 11 cm Stl M omkrets 56–102 cm, höjd 17 cm Stl L omkrets 71–127 cm, höjd 20 cm Justeringsmån i höjd. 12,5 cm	
Underarmsstöd Utan handtag Med handtag	
Handtag Vinkelställbara Passar M, L & XL	

VÅRDBÄLTEN

Leverantör: www.directhealthcaregroup.com

Modeller

Finns i fyra varianter, alla med handtag i vertikal och i horisontell riktning. Max brukarvikt 170 kg.

Flexibelt, Hug

Rörliga, horisontella handtag som glider fritt i öglor och som gör att bältet "kramar om" brukaren i stället för att glida upp under olika förflyttningssituationer.

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Övrigt:	Sammetsklädd insida	

Modell	Flexibelt, Hug stl S	Flexibelt, Hug stl M	Flexibelt, Hug stl L	Flexibelt, Hug stl XL
Art.nr	436 25	436 26	436 27	436 28
Antal handtag	7	9	11	13
Omkrets	60-100cm	70-120cm	100-160cm	115-175

Easybelt, Hug

Rörliga, horisontella handtag som glider fritt i öglor och som gör att bältet "kramar om" brukaren i stället för att glida upp under olika förflyttningssituationer.

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Övrigt:	Avtorkningsbar insida	

Modell	Easybelt, Hug stl XS	Easybelt, Hug stl S	Easybelt, Hug stl M	Easybelt, Hug stl L
Art.nr	436 29	436 30	436 31	436 32
Antal handtag	5 (3+2 rörliga)	7 (4+3 rörliga)	9 (5+4 rörliga)	11 (6+5 rörliga)
Omkrets	45-70cm	60-100cm	70-120cm	100-160cm

EasyBelt

Utgående artikel, kan beställas i mån av tillgång.

Leverantör:	Direct Healthcare Group	
Övrigt:	Avtorkningsbar insida	

Modeller

Modell	EasyBelt stl XS	FlexiBelt stl S	FlexiBelt stl M	FlexiBelt stl L
Art.nr	110 37	026 94	026 95	026 96
Antal handtag	5	7	9	11
Omkrets	45-70cm	60-100cm	70-120cm	100-160cm

FlexiBelt

Utgående artikel, kan beställas i mån av tillgång.

Sammetsklädd insida.

Leverantör	Direct health care group	
Övrigt:	Sammetsklädd insida	

Modeller

	FlexiBelt stl S	FlexiBelt stl M	FlexiBelt stl L	FlexiBelt stl XL
Art.nr	117 08	098 89	117 09	117 07
Antal handtag	7	9	11	13
Omkrets	60-100 cm	70-120 cm	100-160 cm	115-175 cm

HÖFTSKYDDSBYXOR

Leverantör: www.nordicare.se

Försäljningshjälpmedel. Max två par byxor kan förskrivas/gång.

SafeHip airX Unisex

Unisexmodell med insydda mjuka skydd.

Modeller

Stl	Art.nr	Höftmått (cm)
XS	322 51	65–85
S	322 52	75–95
M	322 53	90–110
L	322 54	100–120
XL	322 19	110–140
XXL	322 20	120–150



SafeHip AirX open

Öppen gren och insydda mjuka skydd. Används i kombination med inkontinensbyxa/inkontinensskydd eller vanliga underbyxor. SafeHip open används direkt mot kroppen och inkontinensbyxan/underbyxan tas på ovanpå.

Modeller

Stl	Art.nr	Höftmått (cm)
XS	322 55	65–85
S	322 56	75–95
M	322 57	90–110
L	322 58	100–120
XL	322 12	110–140
XXL	322 13	120–150



SafeHip Active

Höftskydd med kardborrelåsning mitt fram.

Active användes med fördel utanpå kläderna men kan även bäras närmast kroppen.

Stl	Art.nr	Höftmått (cm)
S	322 14	85–95
M	322 15	95–105
L	322 16	105–115
XL	322 17	115–125
XXL	322 18	125–140



HJÄLMAR

Leverantör: www.salubrious.se

Försäljningshjälpmedel. Två hjälmar kan förskrivas/brukare.

Mjuk Hjälms Ribcap

Skyddar huvudet mot lätta slag, skrubbsår och kyla. Levereras med självutlösande spänne.

Modeller

Skyddskeps Baseball

Midi/Maxi:

Stl	Art.nr	Inre Omkrets	Färg
Midi/Maxi	415 57	50–55 cm	Marin
Midi/Maxi	444 21	50–55 cm	Röd
S-M	412 88	53–58 cm	Röd
S-M	412 05	53–58 cm	Marin
L-XL	413 05	59–65 cm	Röd
L-XL	415 56	59–65 cm	Marin



Skyddskeps Bowie

Stl	Art.nr	Inre Omkrets	Färg
S	450 31	53–55 cm	Grå
M	450 30	56–58 cm	Grå
L	450 29	59–61 cm	Grå



Skyddsmössa Lenny Antracit

Stl	Art.nr	Inre Omkrets
Mini Kids	415 80	47–49 cm
Midi Kids	415 79	50–52 cm
Maxi Kids	415 62	53–55 cm
S	415 64	53–55 cm
M	415 63	56–58 cm
L	415 61	59–61 cm
XL	415 65	62–65 cm



Skyddsmössa Iggy Randig

Stl	Art.nr	Inre Omkrets
S	450 34	53–55 cm
M	450 33	56–58 cm
L	450 32	59–61 cm



Skyddsmössa Lenny Summer

Stl	Art.nr	Inre Omkrets
S	45558	53–55 cm
M	450 33	56–58 cm
L	450 32	59–61 cm



Skyddsmössa Billie Cream

Stl	Art.nr	Inre Omkrets
S	450 37	53–55 cm
M	450 36	56–58 cm
L	450 35	59–61 cm



Skyddshjälm Hardy

Stl	Art.nr	Inre Omkrets	Färg
S	415 60	53–55 cm	Marine
S	444 20	53–55	Platinum
M	415 59	56–58 cm	Marine
M	444 19	56–58 cm	Platinum
L	415 58	59–61 cm	Marine
L	444 18	59–61	Platinum



Hård Hjälm Hea

Leverantör: www.heamedical.se

Hjälmen kan användas av personer

- * Med osäker gång, som lätt faller; de med epilepsi
- * Som är självdestruktiva
- * Som skallopererats



Om patientens huvudomfång ligger mellan 2 storlekar så välj den större modellen och fyll ut med anpassningsdynor.

Stl	Art.nr	Inre Omkrets
XS	168 98	50 cm
S	168 99	53 cm
M	169 00	56 cm
L	169 01	58 cm
XL	169 02	64 cm

För tillbehör, se nästa sida.

Tillbehör Hård hjälm Hea

Dyna för Hjässan Art.nr 169 05 Fästs med dubbelhäftande tejp (ingår ej).	
Inläggsband Art.nr 169 03 Har tejp med avtagbart skyddspapper på baksidan.	
Dynor Ovals 4st/sats Art.nr 169 04 Har tejp med avtagbart skyddspapper på baksidan.	
Säkerhetsspänne quick-release Art.nr 419 04, beställs samtidigt som hjälmen	

Mjuk hjälm Toppen

Leverantör: www.minicrosser.se

Skyddar huvudet mot lätta slag, skrubbsår och kyla. Skyddar vid låg fallhöjd (ca 1m) mot huvudskador. Vid fall från högre höjd (vuxen) eller omgivning med mycket vassa kanter och föremål rekommenderas en hård hjälm. Lämpar sig även att bäras nattetid. Levereras med självutlösande spänne.

Stl	Art.nr
45-63 cm Möt huvudomfånget i höjd med ögonbrynet + 1 cm.	Se Websesam

