

Hjälpmiddelsentrum utbildar

Lyftar och lyftselar



Kursansvarig hjälpmedelskonsulent

Eva Scharin

Telefon: 021-17 58 57

E-post: eva.scharin@regionvastmanland.se

Innehållsförteckning

Artikelansvar	3
Utdrag från Hjälpmedelshandboken	4
12 36 Personlyftar	4
Stålyftar (uppresningslyftar)	6
Sabina Stålyft.....	6
Stålyft Minilift 160 EE.....	8
Golvlyftar	10
Golvlyft Birde EVO.....	10
Golvlyft GL5. 1 och GL5.2	11
Golvlyft GL5 2.0.....	12
Golvlyft UNO 102 EE	13
Golvlyft GLHD.....	14
Taklyftar	15
GH3 15	
Lyftselar.....	16
Att tänka på när man väljer lyftsele.....	16
Lyftbygelns bredd.....	17
Lyftselar.....	18
Basselar	18
Lyftselar med låg rygg.....	18
Lyftselar med axelhög rygg.....	20
Lyftselar med hög rygg	22
Hygienselar.....	24
Amputationsselar	26
Hel sele	27
Skalsele.....	29
Lyftbyxa	29
Lyftvästar.....	30
Tillbehör till lyftvästar	30
Övriga tillbehör	31

ARTIKELANSVAR

Styr betalningsansvaret för hjälpmedel

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel är hjälpmedel som är komplexa och kostsamma till exempel eldrivna rullstolar, kommunikationssystem samt tillbehör till dessa.

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedel är manuella rullstolar och rollatorer.

Ansvar 3 – Rekvisitionshjälpmedel. Enklare hjälpmedel som inte förskrivs via Hjälpmedelscentrum. Beställs till enheten, oftast i större antal. Hjälpmedlen är försäljningshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Habiliteringscentrum har kostnadsansvar för hjälpmedel som förskrivs till patienter som beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Hjälpmedel som används i hemsjukvård betalas av Region Västmanland. Exempel på hjälpmedel är badbräda och sängklossar.

Ansvar 4 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer. Hjälpmedlen är hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Kommunen har betalningsansvar för patienter som bor i särskilda boendeformer men beviljats insatser från Habiliteringscentrum. Exempel på hjälpmedlen är omvårdnadshjälpmedel som personlyftar, dusch- och toalettstolar på hjul och reglerbara sängar.

12 36 Personlyftar

ISO-kod 12 36 03

Hjullyft för överflyttning av en sittande person med hjälp av lyftsele.

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Viktig information

Elektrisk mobil lyft är standard.

ISO-12 36 04

Hjullyft för överflyttning av en stående person

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Viktig information

Uppresningslyft används enbart tillsammans med leverantörens egna lyftselar. Uppresningslyft är lämplig till patient med viss tonus i benen.

12 36 12 Stationära personlyftar

Taklyftar

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Utprovning görs i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Taklyft kan förskrivas till patient med ett långsiktigt behov och där mobil personlyft och eller andra förflyttningstekniker är otillräckliga eller olämpliga utifrån patientens medicinska status eller totala omvårdnadsbehov.

Taklyft kan förskrivas när ett av följande kriterier är uppfyllda:

- Utrymmesskäl, svängradie eller uppställningsyta för mobil lyft saknas.
- Patient med smärta och eller rädsla.
- Patient med hög personvikt.
- Svårighet att positionera patienten i rullstol.
- Ensamarbetande vårdare eller assistent.
- Patient som gör självständig förflyttning.
- Barn med funktionsnedsättning som vistas på golv, vid lek, träning och vila.

Dubbelförskrivning

Dubbelförskrivning är möjlig. Flera än två taklyftar i samma bostad kan beviljas i särskilda fall.

Viktig information

Taklyft med rak skena eller travers ingår i grundsortiment. Övriga skensystem, ex. rum till rum-lösningar, kurvor och växlar, samt fler än två taklyftar i samma bostad beviljas i särskilda fall.

Kartlägg patientens förflyttningssituationer och prova mobil personlyft och/eller andra överflyttningstekniker. Om de alternativen inte fungerar eller bedöms som olämpliga utifrån patientens medicinska status och totalt omvårdnadsbehov kan taklyft förskrivas.

Taklyft med rak skena eller travers ingår i grundsortimentet. Övriga skensystem, exempelvis rum till rum-lösningar, kurvor och växlar kan beviljas i särskilda fall.

Montering och demontering av taklyft

Montering och installation av taklyft ska göras av fackman. Installationen bekostas av den enhet som hyr hjälpmedlet och ingår inte i hyrespriset.

Demontering av taklyft ombesörjs av Hjälpmedelscentrum. Efter demontering i badrum/våtutrymmen fylls hål igen med silikon.

Övrig återställning efter demontering av taklyft, till exempel tapetsering eller målning, är egenansvar och bekostas av patient eller verksamhet.

12 36 21 Lyftselar, sitsar och bårar

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Viktig information

De lyftselar samt mobila golv- och taklyftar som finns i Hjälpmedelscentrums sortiment kan kombineras.

Till uppsyningslyftar får endast leverantörens egna lyftselar förskrivas.

STÅLYFTAR (UPPRESNINGSLYFTAR)



Sabina Stålyft

S-13273

- Leverantör:** Liko
- Lager:** Köps inte in, men många återlämnade finns på lager
- Max brukarvikt:** 200 kg
- Funktion:** Används för lyft från sittande till sittande. Brukaren bör kunna stödja sig på sina ben till viss del.
- Komponenter:** Standardbygeln (S-13274) ingår vid förskrivning.
- Övrigt:** Sabina kan, i nödfall, även användas som en traditionell personlyft, för hängande lyft.

Tillbehör Sabina:

Lyftsele Standard

S-12126 stl S
S-12125 stl M
S-12124 stl L
S-12123 stl XL

Västbredd
(inner-/yttermått)

80 / 130 cm
90 / 140 cm
105 / 155 cm
120 / 160 cm

Personvikt

<60 kg
50-80 kg
70-100 kg
>100 kg



Används med standardbygel (S-13274).

Lyftsele Trygg

S-12181 stl M
S-12182 stl L

Västbredd

90 cm
105 cm

Personvikt

<80 kg
>70 kg



Används med standardbygel (S-13274).

Lyftsele Comfort

S-14977 stl S
S-12183 stl M
S-12184 stl L
S-14978 stl XL

Västbredd

80 cm
80 cm
105 cm
120 cm

Personvikt

<60 kg
50-80 kg
70-100 kg
>100 kg




OBS! Används enbart i kombination med Comfortbygel (S-12193)

Rekommenderas då belastning på axeller/armhålor behöver undvikas, till exempel på patienter med halvsidig förlamning eller ledproblematik.


Byglar

S-12193 Comfortbygel
S-13275 Stussbandsbygel

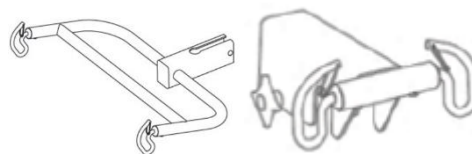

Stussband

S-13276

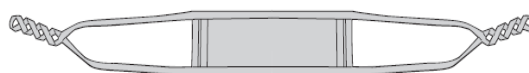



Stålyft Minilift 160 EE

S-41898

- Leverantör:** Direct Healthcare Group (fd Handicare)
- Lager:** Kan förskrivas om Sabina stålyft först provats.
- Max brukarvikt:** 160 kg
- Funktion:** Används för lyft från sittande till sittande. Brukaren bör kunna stödja sig på sina ben till viss del.
- Komponenter:** Vadband S-41992 ingår vid förskrivning.

Tillbehör Minilift:

Lyftsele Thorax Sling

	<i>Västbredd</i>	<i>Rek. Brukarvikt</i>
S-42199, stl S	94 cm	30-60 kg
S-42200, stl M	104 cm	50-80 kg
S-42201, stl L	124 cm	70-110 kg
S-42202, stl XL	146 cm	100-150 kg



Lyftsele Thorax Sling med sätesstöd

	<i>Västbredd</i>	<i>Rek. Brukarvikt</i>
S-42203, stl S	94 cm	30-60 kg
S-41899, stl M	104 cm	50-80 kg
S-41993, stl L	124 cm	70-110 kg
S-42204, stl XL	146 cm	100-150 kg



GOLVLYFTAR



Golvlyft Birde EVO

S-45607

Leverantör:	Invacare
Lager:	Upphandlad lagervara från 250201
Max brukarvikt:	180 kg
Funktion:	Elektrisk höj-sänkning och benspridning. Snabbkoppling, för enkelt byte av lyftbygel
Komponenter:	S-45609 Lyftbygel 45 cm bred (ingår som std) S-45608 Lyftbygel 35 cm bred S-45610 Lyftbygel 55 cm bred
Övrigt:	Underrede höjd 11,5 cm, bredd min 64 cm, max 102 cm. Lyfthöjd min 41,5 - max 166 cm



Golvlyft GL5. 1 och GL5.2

S-41014 och S-42844

Leverantör:	Guldmann
Lager:	Utgången, kan enbart förskrivas vid tillgång på lagret
Max brukarvikt:	205 kg
Funktion:	Elektrisk höj-sänkning och benspridning. Snabbkoppling, för enkelt byte av lyftbygel.
Komponenter:	S-37490 Lyftbygel 44 cm (ingår som standard) S-37491 Lyftbygel 53 cm S-37489 Lyftbygel 34 cm
Övrigt:	Underrede höjd 11,5 cm, bredd min 69,5 cm, max 137,2 cm. Lyfthöjd min 45,6 cm max 175,9 cm

OBS! Sätts på laddning direkt efter leverans till patient. Fulladdat batteri efter ca 4 timmar.



Golvlyft GL5 2.0

S-37860

Leverantör:	Guldmann
Lager:	Utgången, kan enbart förskrivas vid tillgång på lagret
Max brukarvikt:	205 kg
Funktion:	Elektrisk höj-sänkning och benspridning. Snabbkoppling, för enkelt byte av lyftbygel.
Komponenter:	S-37490 Lyftbygel 44 cm (ingår som standard) S-37491 Lyftbygel 53 cm S-37489 Lyftbygel 34 cm
Övrigt:	Underrede höjd 11,5 cm, bredd min 69,5 cm, max 137,2 cm. Lyfthöjd min 45,6 cm max 175,9 cm



Golvlyft UNO 102 EE

S-11620

Leverantör:	Liko
Lager:	Utgången, kan enbart förskrivas vid tillgång på lagret
Max brukarvikt:	175 kg
Funktion:	Elektrisk höj-sänkning och benspridning. Snabbkoppling, för enkelt byte av lyftbygel.
Komponenter:	S-18655 Lyftbygel 45 cm (ingår som standard). S-18654 Lyftbygel 35 cm S-32501 Lyftbygel twin 67 cm (till större personer)



Golvlyft GLHD

S-15342

Leverantör: Guldmann

Lager: **Utgången, kan enbart förskrivas vid tillgång på lagret**

Max brukarvikt: 200 kg

Funktion: Elektrisk höjning och benspridning. Snabbkoppling, för enkelt byte av lyftbygel.

Komponenter: S-15343 Lyftbygel 53 cm (ingår som standard).
S-15344 Lyftbygel 40 cm
S-15411 Lyftbygel 30 cm

TAKLYFTAR



GH3

Förskrivs i samråd med hjälpmedelskonsulent

Leverantör: Guldmann

Lager: Lagervara

Max brukarvikt: 200 kg

Funktion:

Taklyft väljs med fördel till trånga utrymmen, då man önskar ett tryggt, säkert och smärtfritt lyft. Det är också en lösning man gärna väljer då ett långsiktigt behov av lyft föreligger.

Taklyftar underlättar för vårdaren, speciellt vid ensamarbete runt brukaren. En taklyft kan även underlätta för brukare som gör sina förflyttningar självständigt, utan personal, då i kombination med t.ex. lyftväst.

LYFTSELAR

Direct Healthcare Group (DHG) är upphandlad huvudleverantör av basselar, hygienselar och amputationssselar från och med 1 februari 2025.

Guldmanns lyftselar är inte upphandlade längre, men erbjuds i första hand vid förskrivning, om tillgång på lagret finns.

Observera att storlekarna kan skilja sig åt mellan olika leverantörer. DHG:s lyftselar är t ex i allmänhet något större i storlek än Guldmanns.

Ett fåtal specialsselar från andra leverantörer ingår också i sortimentet.

Att tänka på när man väljer lyftsele

Lyftselar finns i många olika varianter. Det är alltid patientens fysiska förutsättningar som avgör vilken modell som kan användas. Frågorna nedan kan ge vägledning.

1. Hur hög ska selens ryggdel vara?

Ju lägre tonus patienten har, desto mer stöd och högre modell av lyftsele behövs. Om stöttning av huvudet krävs, väljs en hög modell eller en axelhög modell i kombination med huvudstöd som tillbehör. Patienter som kan hålla huvudet, men i övrigt har relativt låg tonus, kan använda axelhög modell. Till patienter med god tonus väljs med fördel en låg lyftsele.

Lyftselar avsedda för hygiensituationer, såsom hygienselar eller toalettselar, kan enbart användas av patienter med god tonus i överkropp och höftparti, då selen har låg rygg och stor skärning mellan bendelarna och därmed ger mindre stöd.

2. Hur stor kan bendelarnas skärning vara?

Utrymmet mellan lyftselens bendelar kallas skärning. När bendelarna appliceras och korsas, bildas ett hål under patientens stuss. Är hålet för stort finns risk för urglidningsolyckor. Alla bas-selar har normalstor skärning, men hålet blir förstås olika stort beroende på selens storlek.

Hygien/toalettselar har stor skärning, för åtkomlighet vid hygiensituation.

Amputationssselar har snäv skärning och bendelarna läggs omlott istället för att korsas. Hålet under stussen blir då mycket litet, vilket förebygger urglidningsrisk hos amputerade personer.

Amputationssselar kan även användas till icke amputerade, då man önskar ett mindre hål.

Bendelarna korsas då på vanligt sätt.

3. Vilken storlek ska lyftselen ha?


Det är viktigt att lyftselen har rätt storlek. I bruksanvisningen till varje lyftsela samt på tillverkarnas hemsida, finns storleksguider att använda som riktlinje.

För stor lyftsela



Med en för stor lyftsela hänger stjärten ner och brukaren riskerar att glida ur.

För liten lyftsela

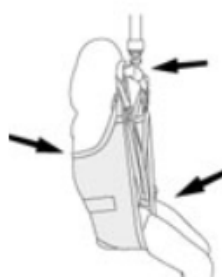

En för liten storlek kan medföra att benstöden skär in i grenen och ger obehag, att lyftbygelns kommer för nära ansiktet och/eller att ryggen ger för lågt stöd.

Rätt storlek



Rätt! Lyftselsens nederkant ligger vid svanskotan. Benstöden ligger bra under benen.

4. Vilket material ska selen vara i?

Det finns två material att välja på; nylon/polyester och nät. Nätmaterial är luftigare och mer lämpligt att sitta länge på. Nylon/polyester är glattare och något lättare att applicera, men bör inte lämnas kvar under patienten någon längre stund, då det blir tätt och varmt.

Lyftbygelns bredd

Bredden på lyftbygelns påverkar också hur lyftet blir. En för smal lyftbygel klämmer ihop patienten i selen. En för bred lyftbygel drar ut lyftselen åt sidorna och försämrar därmed stödet som selen ger.

Man ska eftersträva att lyftselsens bandöglor hänger helt lodräta från lyftselsens krokar.

Breda byglar: Väljs till större patienter och höga lyftselar.

Smala byglar: Väljs till smala patienter och låga lyftselar.

LYFTSELAR

Basselar

Lyftselar med låg rygg

Lyftsele basmodell för personer med bålstabilitet, som vill ha armarna på utsidan.

Guldmann

OBS! Ej upphandlad längre, kan enbart förskrivas vid tillgång på lager.

Max brukarvikt 255 kg på samtliga storlekar.

Lyftsele Basic låg nylon

- S-15381, stl XS
- S-15383, stl S
- S-15384, stl M
- S-15385, stl L
- S-15382, stl XL
- S-15380, stl XXL



Lyftsele Basic låg nät

- S-15387, stl XS
- S-15389, stl S
- S-15390, stl M
- S-15391, stl L
- S-15388, stl XL
- S-15386, stl XXL



DHG (f d Handicare)

Upphandlad från februari 2025.

Max brukarvikt 300 kg på samtliga storlekar.

Lyftsele låg nylon

S-35015, stl XS

S-35016, stl S

S-35017, stl M

S-35018, stl L

S-35019, stl XL

S-35690, stl XXL



Lyftsele låg nät

S-35020, stl XS

S-35021, stl S

S-35022, stl M

S-35023, stl L

S-35024, stl XL

S-35691, stl XXL



Lyftselar med axelhög rygg

Mellanhög lyftsele för personer som behöver stöd runt axlar och skuldror.

Guldmann

OBS! Ej upphandlad längre, kan enbart förskrivas vid tillgång på lager.

Max brukarvikt 255 kg på samtliga storlekar.

Lyftsele Basic mellanhög nylon

S-15364, stl XS

S-15366, stl S

S-15367, stl M

S-15368, stl L

S-15365, stl XL

S-15363, stl XXL



Lyftsele Basic mellanhög nät

S-15373, stl XS

S-15349, stl S

S-15375, stl M

S-15376, stl L

S-15374, stl XL

S-15372, stl XXL



DHG (f d Handicare)

Upphandlad från februari 2025.

Max brukarvikt 300 kg på samtliga storlekar.

Lyftsele Basic mellanhög nät

S-35030, stl XS

S-35031, stl S

S-35032, stl M

S-35033, stl L

S-35034, stl XL

S-35545, stl XXL



Lyftsele Basic mellanhög nylon

S-35025, stl XS

S-35026, stl S

S-35027, stl M

S-35028, stl L

S-35029, stl XL

S-35692, stl XXL



Lyftselar med hög rygg

Lyftsele för personer med låg tonus och behov av stöd för huvudet.

Guldmann

OBS! Ej upphandlad längre, kan enbart förskrivas vid tillgång på lager.

Max brukarvikt 255 kg på samtliga storlekar.

Lyftsele Basic hög nylon

- S-15394, stl XS
- S-15396, stl S
- S-15397, stl M
- S-15398, stl L
- S-15395, stl XL
- S-15393, stl XXL



Lyftsele Basic hög nät

- S-15401, stl XS
- S-15403, stl S
- S-15404, stl M
- S-15405, stl L
- S-15402, stl XL
- S-15400, stl XXL



DHG (f d Handicare)

Upphandlad från februari 2025.

Max brukarvikt 300 kg på samtliga storlekar.

Lyftsele Basic hög nylon

- S-35035, stl XS
- S-35036, stl S
- S-35037, stl M
- S-35038, stl L
- S-35039, stl XL
- S-35693, stl XXL



Lyftsele Basic hög nät

- S-35040, stl XS
- S-35041, stl S
- S-35042, stl M
- S-35043, stl L
- S-35044, stl XL
- S-35694, stl XXL



Hygienselar

Lyftsele med stor skärning, utformad för att underlätta lyftsituationer i samband med toalettbesök och av/på klädnad. Förutsätter god tonus i bål och höfter.

Guldmann

OBS! Ej upphandlad längre, kan enbart förskrivas vid tillgång på lager.

Max brukarvikt 255 kg på samtliga storlekar.

Lyftsele hygien med bälte (nylon)

S-18611, Stl XS

S-18612, Stl S

S-18613, Stl M

S-18614, Stl L

S-18615, Stl XL

S-18616, Stl XXL



DHG (f d Handicare)

Upphandlad från februari 2025.

Lyftsele hygien med bälte (nylon)

S-37861, stl XS

S-37862, stl S

S-37863, stl M

S-37864, stl L

S-37865, stl XL

Rek. Brukarvikt

25-45 kg

40-60 kg

55-85 kg

75-100 kg

90-130 kg



Hygienselar specialmodeller

DHG (f d Handicare)

Upphandlad från februari 2025.

Lyftsele hygien LB (Low Back) Sling

	<i>Rek. Brukarvikt</i>
S-39122, stl XS	25-45 kg
S-36548, stl S	40-60 kg
S-39027, stl M	55-85 kg
S-39170, stl L	75-100 kg
S-43905, stl XL	90-130 kg
S-43905, stl XXL	120-170 kg



Lyftsele ger en mer upprätt sittställning, vilket ger mer stadga i lyftet av personer med lägre tonus.

Lyftsele hygien HB (High Back) Sling

	<i>Rek. Brukarvikt</i>
S-40148, stl XXS	10-30 kg
S-40149, stl XS	25-45 kg
S-39029, stl S	40-60 kg
S-39030, stl M	55-80 kg
S-39031, stl L	75-110 kg
S-43353, stl XL	90-130 kg
S-43909, stl XXL	120-170 kg



Lyftsele ger en mer upprätt sittställning samt stöd för ryggen, vilket ger ytterligare stadga i lyftet av personer med lägre tonus

Amputationsseklar

Används till ensidigt eller dubbelsidigt amputerade personer. Kan även användas med bendelarna korsade på vanligt sätt, då mindre öppning önskas på grund av utglidningsrisk.

Guldmann

OBS! Ej upphandlad längre, kan enbart förskrivas vid tillgång på lager.

Max brukarvikt 255 kg på samtliga storlekar.

Lyftsele amputation mellanhög

S-18713, stl S

S-18618, stl M

S-18714, stl L

S-33838, stl XL



DHG (f d Handicare)

Upphandlad från februari 2025.

Max brukarvikt 300 kg på samtliga storlekar.

Lyftsele amputation mellanhög

S-41676, stl S

S-40375, stl M

S-41675, stl L

S-39795, stl XL

S-39796, stl XXL



Hel sele

Hela selar, även kallade komfortsele eller Sit-On-sele, saknar bendelar. Lämpliga för brukare som är smärtekänsliga, stela eller känner obehag vid lyft. Appliceras enbart i liggande och går ej att ta bort när brukaren sitter på selen i rullstol. Finns i mellanhög och hög modell.

Liko

OBS! Ej upphandlad längre, kan enbart förskrivas vid tillgång på lager.

Max brukarvikt 200 kg på samtliga storlekar.

Comfort-sele mellanhög och hög (nät)

S-36139 mellanhög stl M

S-36140 mellanhög stl L

S-36059 mellanhög stl XL

S-33163 hög stl M

S-36138 hög stl L



Guldmann

OBS! Ej upphandlad längre, kan enbart förskrivas vid tillgång på lager.

Max brukarvikt 255 kg på samtliga storlekar.

Sit-On Comfort-sele mellanhög (nät)

S-40894 mellanhög stl XS

S-40895 mellanhög stl S

S-36708 mellanhög stl M

S-43389 mellanhög stl L

S-36193 mellanhög stl XL



Human Care

Upphandlad från februari 2025.

Max brukarvikt 300 kg på samtliga storlekar.

Comfort Sling-sele mellanhög och hög (nät)

- S-45601, mellanhög stl S
- S-45600, mellanhög stl M
- S-45599, mellanhög stl L
- S-45602, mellanhög stl XL
- S-45605, hög stl S
- S-45604, hög stl M
- S-45603, hög stl L
- S-45606, hög stl XL



Skalsele

Skalsele är gjord i tunt nätmaterial och saknar handtag, förstävningar eller extra sömmar. Skalselen är i första hand avsedd att användas i formgjutna sitsar och sittskal.

Liko

Max brukarvikt 200 kg.

Skalsele (nät)

S-09130, stl XS

S-06252, stl S

S-06272, stl M

S-14758, stl L



Lyftbyxa

Lyftbyxa används till stå- och gå träning för den som har nedsatt balans och tonus.



Kontakta hjälpmedelskonsulent för aktuellt sortiment.

Lyftvästar

Lyftväst finns i två varianter, "bakknäppt" och "framknäppt". Modellen som knäpps på framsidan väljs med fördel till personer som själv kan ta på sig västen och som gör förflyttningen på egen hand.

Liko

Lyftväst bakknäppt (nylon)

S-09368, stl XS
S-04947, stl S
S-01845, stl M
S-04948, stl L
S-07176, stl XL
S-17209, stl XXL



Lyftväst framknäppt (nylon)

S-08992, stl XS
S-06080, stl S
S-06148, stl M
S-12198, stl L
S-12257, stl XL



Tillbehör till lyftvästar

Grenband

S-11631, passar till lyftväst XS/S
S-11630, passar till lyftväst M/L
S-11629, passar till lyftväst XL

Övriga tillbehör

Benpolstring

Handicare

S-35303, stl XS

S-35304, stl S/M

S-35305, stl L/XL



Guldmann

S-15359

Förlängningsögla

S-15362, Grå 20 cm

S-15361, Grå 30 cm

S-03872, Grön 20 cm

S-03873, Grön 30 cm



Huvudstöd

S-15358, Guldmann



Vändsele Turner

S-36362, Guldmann

S-36598, twin stl M

Guldmann



Lyftsele för ben

S-32866, Guldmann

