

Hjälpmiddelsentrum utbildar

# Manöverkontakter och stativ



**Kursansvarig hjälpmedelskonsulent**

Ulrika Eriksson

Telefon: 021-17 49 19

E-post: [ulrika.eriksson@regionvastmanland.se](mailto:ulrika.eriksson@regionvastmanland.se)

Våren 2022

# HJÄLPMEDELSCENTRUM

Hässlö, Signalistgatan 2  
721 31 Västerås  
Kundtjänst: 021-17 30 48

Hjälpmedelskonsulent/arbetsterapeut  
Ulrika Eriksson 021-17 49 19  
[ulrika.eriksson@regionvastmanland.se](mailto:ulrika.eriksson@regionvastmanland.se)

Hjälpmedelskonsulent/arbetsterapeut  
Louise Malmros 021-17 42 57  
[louise.malmros.petitfrere@regionvastmanland.se](mailto:louise.malmros.petitfrere@regionvastmanland.se)

Rehabingenjör  
Michael Larsson via kundtjänst 021-17 30 48  
[michael.larsson@regionvastmanland.se](mailto:michael.larsson@regionvastmanland.se)  
Område: Köping, Arboga, Kungsör,  
Hallstahammar, Surahammar,  
västra Västerås

Hjälpmedelstekniker  
Juha Goman via kundtjänst 021-17 30 48  
[juha.goman@regionvastmanland.se](mailto:juha.goman@regionvastmanland.se)  
Område: Fagersta, Sala,  
östra Västerås

<https://www.regionvastmanland.se/hmc>

<b>HJÄLPMEDELSHANDBOKEN .....</b>	<b>1</b>
<b>SORTIMENT .....</b>	<b>2</b>
<b>MANÖVERKONTAKTER (OMKOPPLARE) .....</b>	<b>2</b>
KONTAKT SPECS .....	2
MANÖVERKONTAKT JELLYBEAN TWIST 4 FÄRGER.....	2
MANÖVERKONTAKT BIGRED TWIST 4 FÄRGER.....	3
MANÖVERKONTAKT PICOBUTTON RÖD .....	3
KONTAKT FINGERBUTTON .....	3
KONTAKT CLICKSWITCH JUSTERBART TRYCK.....	4
KONTAKT MICRO LIGHT 1 FUNKTION .....	4
KONTAKT KUDDKONTAKT .....	4
KONTAKT PINGPONG .....	5
MANÖVERKONTAKT GRASP MED KLÄMFUNKTION .....	5
MANÖVERKONTAKT TRÅDLÖS BLUE2 SWITCH.....	5
KONTAKT BLÅSKONTAKT PUH .....	6
KONTAKT SUG/BLÅS 2 FUNKTIONER.....	6
HÅLLARE FÖR SUG-BLÅSMUNSTYCKE.....	6
KONTAKT SÄNDARE RÖST/LJUDKONTAKT REHATEK .....	7
LARM KONTAKTLIST FÖR SÄNGGRIND .....	7
LARMMATTA 40X70 INKL LEDNING* .....	8
<b>TILLBEHÖR ADAPTRAR .....</b>	<b>8</b>
ADAPTER 6,3MM TELEPROPP – 3,5MM HYLSA* .....	8
ADAPTER 3,5MM TELEPROPP – 6,3MM HYLSA* .....	8
FÖRGRENINGSKABEL AK95 6,3MM TELEPROPP TILL 2X6,3MM HYLSA .....	8
<b>STATIV, MONTERINGSARM &amp; FÄSTE.....</b>	<b>9</b>
FÄSTE MONTERINGSPLATTA FÖR SÄNGGRIND/GAVEL .....	9
FÄSTE MONTERINGSPLATTA FÖR VÄGG .....	9
MONTERINGSARM UNIVERSAL M VRED .....	10
MONTERINGSARM UNIVERSAL M SPAK .....	10
MONTERINGSARM MINIARM .....	10
MONTERINGSARM FLEXIARM.....	11
GOLVSTATIV REHADAPT MED VINKELSTÄLLBART FÄSTE.....	11
IPADHÅLLARE X-GRIP .....	12
TELEFONHÅLLARE LARGE MED LITET KLOFÄSTE .....	12
SURFPLATTEHÅLLARE 9-10T TABLETS 15CM MED LITET KLOFÄSTE .....	12
<b>TILLBEHÖR .....</b>	<b>12</b>

# HJÄLPMEDELSHANDBOKEN

[Hjälpmedelshandboken - Region Västmanland \(regionvastmanland.se\)](http://regionvastmanland.se)

## Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelshandboken är ett stöd för förskrivare av hjälpmedel och styr vilka hjälpmedel som kan förskrivas i Region Västmanland och länets kommuner, vilka kriterier som gäller vid förskrivning och vilka avgifter som tas ut.

Hjälpmedelshandboken bygger på **lagar, förordningar och föreskrifter** som reglerar hälso- och sjukvården generellt och hjälpmedelsområdet specifikt. Hjälpmedelshandboken är gemensam för samtliga hjälpmedelsområden och beslutas av politiker i regionstyrelsen eller hjälpmedelsnämnden.

Under rubriken Gemensamma bestämmelser finns information som gäller för samtliga hjälpmedelsområden. Övriga rubriker bygger på indelningen på 1177 Vårdguiden. Där beskrivs respektive hjälpmedel och de förutsättningar som gäller vid förskrivning. Hjälpmedel som hanteras av Hjälpmedelscentrum finns under flera olika rubriker.

Gemensamma bestämmelser	+	
Rörelse	+	
Träning, vård och behandling	+	
Kognition och kommunikation	-	
Minne, tid och planering	Samtal, röst, tal, tele, läs och skriv	Tyngdprodukter
Hantering av föremål	Larm	Rådgivning eller anpassning av egenägd produkt
I hemmet		
Inkontinens		

Sortimentet är föränderligt, dvs vad som finns att tillgå för tillfället och vi hittar alternativ efter behov.

## SORTIMENT

### MANÖVERKONTAKTER (OMKOPPLARE)

ISO-kod 24 09 18

Avser manöverkontakter för att kunna sätta på eller stänga av strömkretsar.

#### **Kriterier för förskrivning**

Kan förskrivas till patient som på grund av funktionsnedsättning inte kan hantera små knappar eller vred till exempelvis dator, telefon, radio eller larm.

#### **Förskrivare**

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

#### **Kontakt Specs**

Manöverkontakt med en funktion som finns i flera färger. Samma kraft behövs över hela tryckytan, ger ett tydligt klickljud vid aktivering. Mått; 3,5 cm i diameter. Enkel att montera med t ex dubbelhäftande kardborrband eller med hjälp av bottenplatta som har färdiga skruvhål eller bottenplatta med möjlighet att fästa kardborreband. Tillverkad i tålig plast.

Leverantör: Rehabcenter AB

**S-09689** röd

**S-09692** grön

**S-09691** blå

**S-09690** gul

**S-09693** svart



#### **Manöverkontakt JellyBean Twist 4 färger**

Ersätter Kontakt JellyBean alla färger, ersättningskedja är gjord från de gamla sesamnumren. Manöverkontakt med en funktion som har fyra utbytbara lock och ett genomskinligt snaplock.

Ger ett tydligt klickljud vid aktivering. Kan te x monteras med kardborrband eller med hjälp av färdiga skruvhål. Tillverkad i tålig plast. 3,5 mm stickpropp.

Mått: 6 cm i diameter.

Leverantör: Rehabcenter AB

**S- 37062**



### **Manöverkontakt BigRed Twist 4 färger**

Ersätter Kontakt BigRed alla färger, ersättningskedja är gjord från de gamla sesamnumren. Manöverkontakt med en funktion som har fyra utbytbara lock och ett genomskinligt snaplock. Ger ett tydligt klickljud vid aktivering. Enkel att montera med t ex dubbelhäftande kardborrband eller genom färdiga skruvhål. Tillverkad i tålig plast.

Mått: 12 cm i diameter

Leverantör: Rehabcenter AB

**S-37063**



### **Manöverkontakt PicoButton röd**

Mått 3,5 cm. Passar bra till montering på Mini-arm S-33472, skruvas direkt på den.

Leverantör: Abilia AB

**S-34681**



### **Kontakt FingerButton**

Lättryckt kontakt med en funktion insydd i ett kardborrband som fästs runt fingret. Vikt 35 g.

Leverantör: Abilia

**S-17455**



### **Kontakt Clickswitch Justerbart tryck**

Lättryckt kontakt med en funktion. Med möjlighet att ställa in tryckkänsligheten. Knottig yta på trycksidan för taktill feedback. Storlek 6x3 cm.

Leverantör: Abilia

**S-13312**



### **Kontakt Micro Light 1 Funktion**

Mycket lättryckt kontakt med en funktion. Ger ett klickljud vid tryck för auditiv feedback.

Storlek 2x4,5 cm.

Leverantör: Picomed

**S-02826**



### **Kontakt Kuddkontakt**

Lättryckt kontakt med en funktion innesluten i en tygpåse som är avtag- och tvättbar. Ger en auditiv feedback vid aktivering.

Storlek 10,5x60 cm. Vikt 50 g.

Leverantör: Rehabcenter AB

**S-03576**



## Kontakt PingPong

Lättryckt pingpongbollkontakt med en funktion som sitter på en flexiarm. Kontakten som är rund gör det lätt att trycka från olika vinklar, behöver inte tryckas mitt på. Flexiarmen har en klämma som går att fästa på runda rör men även på tex en bordskant. Finns med 30 och 50 cm lång arm. Ger ett klickljud vid aktivering.

Leverantör: Knop Rehatek

**S-15185** 30cm

**S-14725** 50cm



## Manöverkontakt Grasp med klämfunktion

En lättryckt klämkontakt med utbytbart skumgummiöverdrag.

Storlek: 3,5 diam x 14 cm

Leverantör: Picomed

**S-02829**



## Manöverkontakt trådlös Blue2 switch

Enkel trådlös kontaktstyrning till surfplattor, smarta telefoner och datorer.

Blue 2 ansluts via Bluetooth på din enhet. Kontakten aktiveras med ett lätt tryck, flera driftlägen för kompatibilitet till alla appar.

Leverantör: Picomed

**S-36070**





### **Kontakt Blåskontakt Puh**

Kontakt med en funktion som kan aktiveras genom en mycket svag blåsning, ett "puh" i ett munstycke som inte behöver sättas i munnen. Avståndet mellan blåskontakten och munnen kan vara upp till 10 cm, vid svagare "puh" minskar man avståndet. Kontakten sitter på ett bordsstativ med en bordstving. Kan regleras via ett höj-, sänk- och vinkelställbart fäste samt en flexiarm.

Leverantör: Rehatek

**S-12538**



### **Kontakt sug/blås 2 funktioner**

Sug- och blåskontakt 2 funktioner med slutande kontakter. Två st 1,5 m kablar med 3,5 mm teleproppar. Komplettera med hållare, slang, salivavskiljare och munstycke.

Leverantör: Abilia

**S-03035**



### **Hållare för sug-blåsmunstycke**

Komplett med hållare, slang, salivavskiljare och munstycke.

**S-03036**



## Kontakt sändare röst/ljudkontakt Rehatek

Används för att registrera och indikera ljud, så det går ett larm. Den har ett mycket stort känslighetsområde och kan ställas in så att också svaga ljud indikeras. Även ljudets varaktighet kan ställas in. Dessa två inställningsmöjligheter gör att det går att utesluta normala ljud som snarkningar mm. Kan användas både som manöverkontakt och larm. Leverantör: Knop Rehatek

**S-06347**



## Larm kontaktlist för sänggrind

Används för att uppmärksamma personal eller anhörig om att en patient/brukare är på väg att kliva ur sängen. Kan även användas som manöverkontakt och styra befintligt larm eller kopplas till INKA. Listen monteras enkelt med dubbelhäftande tejp ovanpå en uppfälld sänggrind och kopplas lätt in i det befintliga larmsystemet. Man kan även koppla kontaktlisten till en sändare som trådlöst sänder ett larm till personalen. När patienten kommer i kontakt med listen, t.ex. lägger ett ben på grinden för att klättra över skickas ett larm. Kontaktlisten är helt tät vilket gör den enkel att rengöra och desinficera. Leverantör: Knop Rehatek

**S-34550** Larm kontaktlist för sänggrind 160cm

**S-34551** Larm kontaktlist för sänggrind 80cm

Tillbehör:

**S-34552** Dubbelhäftande tejp\*



## Larmmatta 40x70 inkl ledning\*

Larmmatta används för att indikera om en person t.ex. stiger upp ur sängen eller passerar en dörr. Kan även användas som manöverkontakt och styra befintligt larm eller kopplas till larmsändare. Placera mattan under en golvmatta eller i en skyddsmatta.

Leverantör: Knop Rehatek

### S-36102

Tillbehör:

S-14310 Larmmatta skyddsmatta\*



## TILLBEHÖR ADAPTRAR

Alla kontakter har en kabel om ca 1,5 m med en 3,5 mm stickpropp, denna kan anpassas med en adapter till en 6,3 mm stickpropp, direkt in i befintligt larmuttag på de flesta särskilda boenden och vårdavdelningar, Om de har ett uttag på 6,3 mm.

### Adapter 6,3mm telepropp – 3,5mm hylsa\*

S-35365



### Adapter 3,5mm telepropp – 6,3mm hylsa\*

S-35366



### Förgreningskabel AK95 6,3mm telepropp till 2x6,3mm hylsa

För att ansluta två olika kontakter i ett befintligt larm med 6,3 mm hål i väggen behövs

S-35394



## STATIV, MONTERINGSARM & FÄSTE

ISO-kod 24 18 12

Monteringsarm eller stativ är en fristående hållare som håller ett föremål i ett stadigt läge, exempelvis en manöverkontakt eller samtalsapparat.

### Kriterier för förskrivning

Kan förskrivas som en anpassning till samtalsapparater, omkopplare/manöverkontakter, larm, inmatningsenheter till datorer, handdator med kalenderprogramvara, bärbara datorer och fjärrstyrssystem.

Kan också förskrivas till patientens egenägda produkter inom kommunikation- och informationsområdet som inte kan hanteras på grund av funktionsnedsättning.

### Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och logoped för talskadade.

### Fäste Monteringsplatta för sänggrind/gavel

Fästplatta i plexiglas som på ett smidigt sätt kan placeras/hängas på en sänggavel med en eller flera kontakter monterade på. Mått 10x15 cm.

Leverantör: Zafe System Care AB

**S-18546**



### Fäste Monteringsplatta för vägg

Fästplatta i plexiglas med plats att montera på en eller flera kontakter eller dyl. Mått 20x21 cm. Behöver skruvas med endast en skruv i väggen.

Leverantör: Zafe System Care AB

**S-32666**



### Monteringsarm Universal m vred

Hållare för kontakter, sändare o dyl. Kraftig och lättjusterad monteringsarm som är lätt att hantera med en gemensam låsning för de tre justerbara lederna. Kan fästas på både rör och bordsskivor. Kan bli upp till 0,5 m lång. Kan belastas upp till 2 kg.

Specialanpassning vid montering på rullstol eller säng.

Leverantör: Rehabcenter AB

S-17987



### Monteringsarm Universal m spak

(har utgått men kan finnas på HMC:s lager (t.ex. återlämnade))

Funktion som ovan men med spak som låsning.

Leverantör: Rehabcenter AB

S-06947



### Monteringsarm Miniarm

Smidig och flexibel monteringsarm som passar för t.ex. manöverkontakter med M 6 gänga. Adapter för M 4 gänga ingår. Total längd 40 cm, låsvred på 22 cm höjd som låser alla leder.

Leverantör: Abilia

S-33472

Tillbehör:

S-34549 200 mm förlängning



### **Monteringsarm Flexiarm**

Böjbar, lätt att ställa in till rätt läge.

Leverantör: Knop Rehatek AB

**S-34172** Monteringsarm Flexiarm 30 cm

**S-34173** Monteringsarm Flexiarm 60cm



### **Golvstativ RehAdapt med vinkelställbart fäste**

Höj-och sänkbart. Har ett vinkelställbart fäste för ögonstyrningsdatorn.

Leverantör: Tobii Dynavox

**S-34195**



### **iPadhållare X-grip**

Passar på Monteringsarm Universal m vred S-17987 och m spak S-06947.

Passar till följande dimensioner:

Min bredd: 15,88 cm

Max bredd: 20,57 cm

Max Djup: 2,22 cm

Leverantör: Picomed

**S-36712**



### **Telefonhållare Large med litet klofäste**

Passar telefoner med bredd 76-114mm.

Leverantör: Funktionsverket

**S-41890**



### **Surfplattehållare 9-10t tablets 15cm med litet klofäste**

Hållaren passar de flesta surfplattor i storleksintervallet 9,7" – 10,5" (t.ex. iPad Air 2, iPad Pro 9,7, iPad 9.7 (2017) och Samsung Galaxy Tab-serierna). Flexibiliteten gör att de flesta surfplattor dessutom kan monteras i hållaren även om de har ett skyddande skal som t.ex. en Otterbox Defender eller Griffin Survivor.

Leverantör: Funktionsverket

**S-41931**



## **TILLBEHÖR**

Kontakta hjälpmedelskonsulent så gör vi en kartläggning av behov.