


Sitthöjdstabell Cross 5

Bakre sitthöjdstabell


Drivhjulposition höjd

Sitshöjd bak

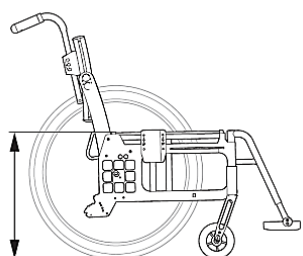


Bak


Fram

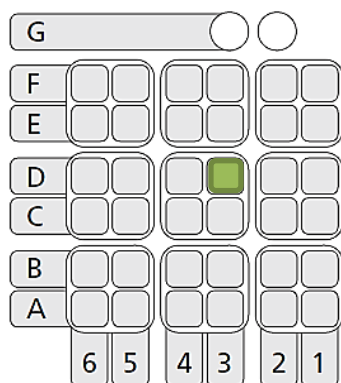


Avstånd drivhjul till sits

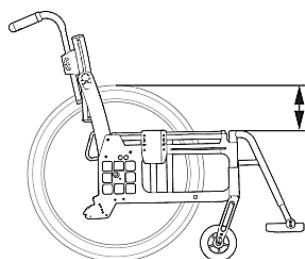

Montering i pos. G1 & G2

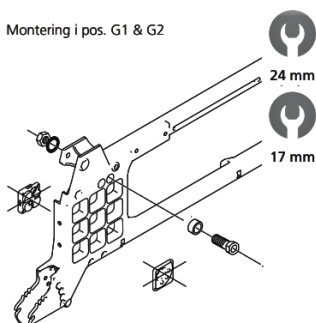

		Drivhjul	Sitshöjd	Avstånd	Cross 5	Cross 5 XL
Position A	20"		46 cm	4,5 cm	●	●
	22"		48,5 cm	7,0 cm	●	●
	24"		51 cm	9,5 cm	●	●
	26"		53 cm	12 cm	●	●
Position B	20"		44 cm	6,5 cm	●	●
	22"		46,5 cm	9,0 cm	●	●
	24"		49 cm	11,5 cm	●	●
	26"		51 cm	14 cm	●	●
Position C	20"		42 cm	8,5 cm	●	●
	22"		44,5 cm	11,0 cm	●	●
	24"		47 cm	13,5 cm	●	●
	26"		49 cm	16 cm	●	●
Position D	20"		40 cm	10,5 cm	●	●
	22"		42,5 cm	13,0 cm	●	●
	24"		45 cm	15,5 cm	●	●
	26"		47 cm	18 cm	●	●
Position E	20"		38 cm	12,5 cm	●	●
	22"		40,5 cm	15,0 cm	●	●
	24"		43 cm	17,5 cm	●	●
	26"		45 cm	20 cm	●	●
Position F	20"		36 cm	14,5 cm	●	●
	22"		38,5 cm	17,0 cm	●	●
	24"		41 cm	19,5 cm	●	●
	26"		43 cm	22 cm	●	●
Position G	20"		34 cm	16,5 cm	●	●
	22"		36,5 cm	19,0 cm	●	●
	24"		39 cm	21,5 cm	●	●
	26"		-	-		

OBS! För position G krävs Distans S-35567, 2 st

- Drivhjul Cross 5 massiva 20" utan drivring S-35426
- Drivhjul Cross 5 massiva 22" utan drivring S-35425
- Drivhjul Cross 5 massiva 24" utan drivring S-35424
- Drivring metall 17" S-07062
- Drivring metall 19" S-03503
- Drivring metall 21" S-05578

- Drivhjul Cross 5/Cross 6 20t qr för vårdarbroms, alu-drivring S-36447
- Drivhjul Cross 5/Cross 6 22t qr för vårdarbroms, rfr-drivring S-35930
- Drivhjul Cross 5/Cross 6 24t qr för vårdarbroms, rfr-drivring S-17325

Främre sitthöjdstabell

Sitthöjdsjustering genom byte av framgaffel/länkhjul

Främre sitthöjdstabell														Cross-5	Cross 5 XL	
		Länkhjulposition (cm)														
Länkhjul	Drivhjul-position	Länkhjul	Gaffel extra kort			Gaffel Kort			Gaffel Medium			Gaffel Lång			Cross-5	Cross 5 XL
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
Lågt breddat länkhjulsfäste	G	4" **	-	34-38	35,5-39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Lågt breddat länkhjulsfäste	A-F	5" ***	-	-	-	36-40	37,5-41,5	39-43	-	-	-	-	-	-	●	●
		6 1/2"	-	-	-	-	-	41-45	-	-	-	-	-	-	●	●
Std länkhjulsfäste	A-F	5" ***	-	-	-	37,5-41,5	39-43	40,5-44,5	43-46	45-48	46-49	-	-	-	●	●
		6 1/2"	-	-	-	-	41-45	42,5-46,5	46-48	47-49	48-51	50,5-52,5	51,5-53,5	52,5-55,5	●	●
	A-C	8" **	-	-	-	-	-	-	-	48-51	49-52	-	52,5-54,5	53,5-56,5	●	●

Grön markering anger standardinställning

*Max brukarvikt 100 kg

För korrekt inställning av framgaffelfästet: Max bakåtvinkling 6 cm högre fram än bak (9°), max framåtvinkling 2 cm lägre fram än bak (3°).

**Fungerar i balansering 4-6 med 3° bakåtvinkel och Std benstöd. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare. För länkhjul 8x2", använd gaffel Transit (ger sitthöjd 47-51 cm).

***Med Cross 5 XL max brukarvikt 135 kg.

Länkhjul Cross 5 massivt 5" (***) S-11154

Länkhjul Cross 5 massivt 6,5" S-02841

Framgaffel Cross 5 kort S-01123

Framgaffel Cross 5 medium S-01124

Framgaffel Cross 5 XL kort S-36702

Framgaffel Cross 5 XL medium S-36703

Vid behov av extra låg eller extra hög sitthöjd (4" eller 8" länkhjul) – kontakta hjälpmedelskonsulent.