

Förskrivning av infusionspump CADD Solis VIP

Förskrivning av pump gör man i systemet som heter Visma Websesam. För att få inlogg till det behöver man genomföra två (online)utbildningar.

Här finns information om de utbildningar som man behöver genomföra för att bli forskrivare och få inlogg till forskrivningssystemet Visma Websesam.

<https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/hjalpmedel/hjalpmedelscentrum/>

Scrolla ner på sidan och klicka på fliken "utbildningar".

De utbildningar som måste genomföras är:

- Förskrivning av hjälpmedel – Grund (finns på Kompetensplatsen)
- Visma Websesam – Förskrivarutbildning förenklad (finns på Kompetensplatsen)

CADD Solis VIP kan användas både som smärt- och volympump. Den levereras som ett komplett paket, se bild vilka delar som ingår.

Kliniker som ofta forskriver CADD Solis VIP har egna lager med pumpar i verksamheten som de gör uttag ifrån. Hjälpmedelscentrum ansvarar för att fylla på dessa lager med nya pumpar när ett uttag har gjorts. Kliniker som forskriver CADD Solis VIP mer sällan har inga egna lager utan kontaktar Hjälpmedelscentrum för beställning och leverans.

Hjälpmedelscentrum handhar enbart pumparna. Aggregat och övriga tillbehör beställs av personal på behandlande klinik. Se leverantörens artikelnummer längre ner i detta dokument.

S-44138 Infusionspump CADD Solis VIP



1. Patientinformation (tillhandahålles av leverantören)
2. S-46329 Förvaringsväska CADD Solis VIP blå
3. S-44262 Platta till droppställningsfäste CADD Solis VIP
4. S-44261 Nätströmsadapter CADD Solis VIP
5. S-44138 Infusionspump CADD Solis VIP
6. S-44260 Batteripack CADD Solis VIP
7. S-44264 Pumpnyckel CADD Solis VIP

Kontaktuppgifter till ansvariga hjälpmedelskonsulenter på Hjälpmedelscentrum:

Emelie Lundqvist

emelie.lundqvist@regionvastmanland.se

021-176472

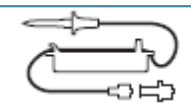
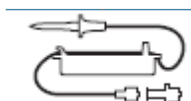
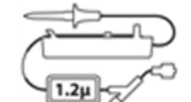
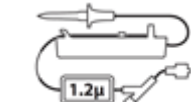
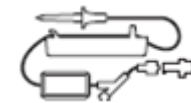
Sanna Hermansson

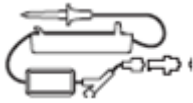
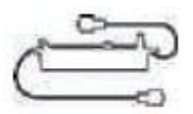
sanna.hermansson@regionvastmanland.se

021-4818404

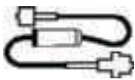
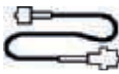
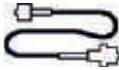
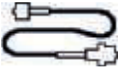
INFUSIONSAGGREGAT rekommenderat för TPN, Antibiotika, cytostatika, klara vätskor

Förbrukningsartiklarna beställs via Varuförsörjningen.se

21-7057-24 Infusionsaggregat (15 st / förp)	Infusionsaggregat med insticksnål (Spike) för infusionspåse. För infusionshastigheter upp till 500 ml/tim. Längd: 234cm Fyllningsvolym: 11ml <i>Lämpar sig bra för TPN-behandlingar</i>			
21-7357-24 Infusionsaggregat (15st/förp.)	Infusionsaggregat med insticksnål (Spike) för infusionspåse. För infusionshastigheter upp till 500 ml/tim. Längd: 234cm Fyllningsvolym: 11ml (Samma som ovan fast med flowstop istället för antisifonventil) <i>Lämpar sig bra för TPN-behandlingar</i>			
21-7361-24 Infusionsaggregat (15st/förp.)	Infusionsaggregat med insticksnål (Spike) för infusionspåse För infusionshastigheter upp till 500ml/tim Längd: 300cm Fyllningsvolym: 18 ml Nålfri injektionsport <i>Lämpar sig bra för TPN behandlingar med filter</i>			
21-7364-24 Infusionsaggregat (15 st/ förp)	Infusionsaggregat med insticksnål (Spike) för infusionspåse För infusionshastigheter upp till 500ml/tim Längd: 300cm Fyllningsvolym: 18 ml Injektionsport med backventil och han-luer <i>Lämpar sig bra för TPN behandlingar med filter.</i>			
21-7343-24 Infusionsaggregat (15 st/förp)	Infusionsaggregat med insticksnål för infusionspåse För infusionshastigheter upp till 250ml/tim. Längd: 290cm Fyllningsvolym: 15,5ml <i>Lämpar sig bra för TPN behandlingar med filter</i>			

21-7345-24 Infusionsaggregat (15 st / förp)	Infusionsaggregat med insticksnål (Spike) för infusionspåse. För infusionshastigheter upp till 500 ml/tim. 0,2 Micron filter, injektionsport. Längd: 305cm Fyllningsvolym: 20ml <i>Lämpar sig bra för Klara vätskor</i>			
21-7321-24 Infusionsaggregat (12st/förp)	Infusionsaggregat med Hon-luer Infusionshastighet upp till 250ml/h Längd: 259cm Fyllningsvolym: 2,7ml <i>Lämpar sig bra för Cytostatika eller antibiotika som tillreds på läkemedelsberedningar.</i>			
21-7363-24 Infusionsaggregat (15st/förp)	Infusionsaggregat med insticksnål (Spike) för infusionspåse. <i>Spiralslang</i> För infusionshastigheter upp till 250 ml/tim. 0,2 Micron filter, injektionsport. Längd: 239cm Fyllningsvolym: 10ml			
21-7359-24 Infusionsaggregat (12st/förp)	Infusionsaggregat med Han-luer Infusionshastighet upp till 250ml/h Längd: 175cm Fyllningsvolym: 2,0ml <i>Lämpar sig bra för Cytostatika eller antibiotika som tillreds på läkemedelsberedningar.</i>			

Förlängningsset för infusioner med kassett

21-7044-24 Förlängningsset med filter (25 st / förp)	CADD® förlängningsset med han/han-Luer, lufteliminerande filter på 0,2 mikron och inbyggt friflödesstopp med klämma, inte tillverkat med DEHP Längd: 55 in. (140 cm) Fyllningsvolym: 4,6 mL Lämpar sig bra för cytostatika			
21-7045-24 Förlängningsset (50st/förp.) 21-7060-24 Förlängningsset (12st/förp)	CADD® förlängningsset med han/han-Luer, inbyggt friflödesstopp och klämma, inte tillverkat med DEHP Längd: 30 in. (76 cm) fyllningsvolym: 1,1 mL Lämpar sig bra för smärtbehandling			
21-7046-24 Förlängningsset (50st/förp.) 21-7061-24 Förlängningsset (12st/förp)	CADD® förlängningsset med han/han-Luer, inbyggt friflödesstopp och klämma, inte tillverkat med DEHP Längd: 45 in. (114 cm) fyllningsvolym: 1,4 mL			
21-7047-24 Förlängningsset (50st/förp) 21-7062-24 Förlängningsset (12st/förp)	CADD® förlängningsset med han/han-Luer, inbyggt friflödesstopp och klämma, inte tillverkat med DEHP Längd: 60 in. (152 cm) fyllningsvolym: 1,7 mL			

Kontaktuppgifter vid frågor angående CADD Solis pumpen:

ICU Medical

Tel: 08-594 772 53

Info.sweden@icumed.com