

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE – UPPRESNINGSSTÖD EVA

Några allvarliga incidenter har inträffat vid användning av uppresningsstöd EVA, där brukare har klämts/fastnat mellan stödet och madrassen.

Vi vill uppmärksamma att felmontering av golvplattan kan skapa en glipa som medför risk för klämskador, särskilt i kombination med mjuka madrasser.

Vid montering ska skruvskallarna på golvplattan peka *inåt* mot sängen, så att stödet får en svag lutning in mot sängen.

Läs noga igenom bruksanvisning innan montering och iaktta särskild försiktighet vid montering på sängar med mjuka resåradrasser.

Säkerställ att EVA-stödet är korrekt monterat och att ingen glipa finns mellan uppresningsstödet och sängen.