

Viktig ändring vid provtagning för SARS-CoV-2-PCR

Efter NPH- och svalgprovtagning för Sars CoV-2-PCR ska provtagningspinnen roteras kraftigt i provtagningsröret i 30 sekunder, därefter ska vätskan i provtagningspinnen pressas ur genom att pinnen pressas mot rörets insida. Därefter ska pinnen kastas. Inga pinnar får skickas med till laboratoriet. De flockade pinnarna som används i Region Västmanland släpper lätt ifrån sig material till vätskan i röret.

Den nya rutinen möjliggör att det mikrobiologiska laboratoriet kan förkorta svarstiderna eftersom rören utan pinnar kan sättas direkt i PCR-instrumentet.

Elisabeth Freyhult
Specialistläkare
Klinisk Mikrobiologi
Laboriemedicin

Tania Gajardo Gunnarsson
Leg. Biomedicinsk analytiker
Klinisk mikrobiologi
Laboriemedicin