

Byte av kontroller - CRP, PNV Afinion

Med start måndag 2024-09-02 ska kontrollkörning av CRP på analysinstrument Afinion utföras med Abbotts kontroller CRP1 och CRP2. Nuvarande kontroller K4 och K6 (Seronom) ska inte längre användas från och med måndag.

Handhavandet förblir i stort sett detsamma. En skillnad är att CRP1 och CRP2 inte behöver vara rumstempererade och kan således användas direkt efter att de tas ut ur kylskåpet. Tyvärr har "droppkorkarna" gått ur sortimentet och man får i stället försöka fånga upp provmaterial direkt ur flaskan.

PNV skickar ut nya kontroller med tillhörande streckkoder som ska sättas på instrumentet. Streckkoderna för K4 och K6 ska tas bort. [Kontrollbeskrivning CRP, PNV Afinion \(69728\)](#) och [Kontrollfacit PNV \(LM955\)](#) finns i ledningssystemet.

Vid frågor kontaktas PNV-support på telefonnummer 021 - 175199 eller via mejl till pnv.laboratoriemedicin@regionvastmanland.se.

Karin Fredriksson
Biomedicinsk analytiker
Laboratoriemedicin

Therése Ehrenstråhle
Laboratorieingenjör
Laboratoriemedicin